

Pojemnik jałowy do pobierania moczu od noworodków i niemowląt dla chłopców 150 ml, 1 szt.

Cena: 2,49 zł



Opis słownikowy

Postać	pojemnik
Producent	Art-Med E. Jachimowska H. Kaczmarczyk
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Działanie Pojemnik jałowy do pobierania moczu od noworodków i niemowląt dla chłopców 150 ml, 1 szt.

Pojemniki sterylizowane są radiacyjnie w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Wszystkie surowce i półprodukty użyte do produkcji pojemnika jak również zastosowana metoda sterylizacji, gwarantują bezpieczny kontakt ze skórą dziecka.

Wskazania Pojemnik jałowy do pobierania moczu od noworodków i niemowląt dla chłopców 150 ml, 1 szt.

Pojemnik na mocz przeznaczony jest do pobierania uryny dziecięcej niezbędnej by przeprowadzić:

badanie ogólne moczu,
posiew moczu (badanie bakteriologiczne moczu),
badania wykonywane w celu wykrycia chorób.

Dawkowanie Pojemnik jałowy do pobierania moczu od noworodków i niemowląt dla chłopców 150 ml, 1 szt.

Wyjąć pojemnik, odciągnąć załamane dno pojemnika, usunąć przekładkę papierową, przykleić do ciała pojemnik tak, aby otwór pokrywał się z anatomicznym ujściem cewki moczowej, napełniony pojemnik odkleić do ciała, załamać powierzchnię lepną, a następnie skleić.

Informacje dodatkowe Pojemnik jałowy do pobierania moczu od noworodków i niemowląt dla chłopców 150 ml, 1 szt.

W celu zachowania pełnej sterylności nie dopuszcza się uszkodzenia pojemnika oraz kontaktu palców lub jakichkolwiek przedmiotów z jego wnętrzem.

Kontakt pojemnika z ciałem dziecka nie powinien przekraczać 60 minut.

W przypadku uszkodzenia opakowania, wyrób jest niejałowy.