

## Pre-Test, płytkowy test ciążowy, 1 szt



Cena: 17,09 zł

### Opis słownikowy

Postać	test
Producent	Rada
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Pre-Test, płytkowy test ciążowy, 1 szt

PRE-TEST jest testem diagnostycznym in-vitro. Umożliwia określenie obecności w moczu hormonu hCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa), wytwarzanego wkrótce po zapłodnieniu przez komórki trofoblastyczne rozwijającego się łożyska. Test najlepiej wykonać w pierwszym dniu, w którym nie wystąpiła spodziewana miesiączka, lub w kolejnych dniach.

## Skład Pre-Test, płytkowy test ciążowy, 1 szt

1. Ulotka informacyjna.
2. Test oraz pipeta w szczelnej saszetce z folii aluminiowej.
3. Pojemnik na mocz.

## Dawkowanie Pre-Test, płytkowy test ciążowy, 1 szt

Przed przeprowadzeniem testu zebraj niewielką ilość moczu do załączonego pojemnika. Jeżeli mocz zawiera widoczny osad, to powinien być odstawiony do opadnięcia osadu w celu uzyskania czystej próbki do testu.

Rozerwij folię w miejscu nacięcia i wyjmij płytkę testową oraz pipetę, a następnie połóż na czystej, płaskiej powierzchni.

Końcówkę pipety zanurz w pojemniku, w którym znajduje się próbka moczu.

Nabierz mocz do pipety, ściskając jej górną część.

Trzymając pipetę pionowo, umieść 3 krople moczu w przeznaczonym do tego okienku S (rysunek powyżej).

Po 3 minutach odczytaj wynik (w zależności od stężenia hCG wynik „Ciąża” można zaobserwować już po 40 sekundach). Po upływie 10 minut nie odczytuj wyniku, ponieważ wskazania testu mogą być nieprawidłowe.

Ciąża: jeżeli pojawią się dwie linie, jedna w obszarze testowym (T), druga w obszarze kontrolnym (C), oznacza to, że prawdopodobnie jesteś w ciąży, nawet jeżeli jedna z linii jest słabo widoczna.

Brak ciąży: jeżeli linia pojawi się tylko w obszarze kontrolnym (C), oznacza to, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

Wynik nieważny: jeżeli w obszarze kontrolnym (C) nie pojawi się linia, oznacza to, że wynik jest nieważny. Najprawdopodobniej użyto niewystarczającej ilości moczu lub test został przeprowadzony nieprawidłowo.

W takiej sytuacji test należy wykonać ponownie przy użyciu nowego testu ciążowego.

Uwaga: intensywność czerwieni linii w obszarze testowym (T) może być różna w zależności od stężenia hormonu hCG w moczu.

## Informacje dodatkowe Pre-Test, płytkowy test ciążowy, 1 szt

Niniejszy test umożliwia zdiagnozowanie przypuszczalnej ciąży. Użytkowniczka testu nie powinna podejmować żadnych decyzji o znaczeniu medycznym bez wcześniejszego skonsultowania się ze swoim lekarzem.

Podwyższenie poziomu hormonu hCG może być spowodowane przez pewną liczbę stanów medycznych innych niż ciąża, w tym przez choroby trofoblastyczne oraz niektóre nowotwory nietrofoblastyczne, takie jak rak piersi, rak płuc, a ponadto nowotwory jąder lub rak prostaty. W związku z powyższym obecność hormonu hCG w próbce moczu nie powinna być wykorzystywana do diagnozowania ciąży, jeśli nie wykluczono obecności wyżej wymienionych schorzeń.

Bardzo rozcieńczone próbki moczu, cechujące się niskim ciężarem właściwym, mogą nie zawierać reprezentatywnych ilości hCG. W przypadku dalszego podejrzenia ciąży, po upływie 48 godzin należy powtórzyć test przy użyciu pierwszego porannego moczu.

W przypadku, gdy poziom hCG jest poniżej progu czułości testu, możliwe jest uzyskanie fałszywych wyników „Brak ciąży”. W przypadku dalszego podejrzenia ciąży, po upływie 48 godzin należy powtórzyć test przy użyciu pierwszego porannego moczu.

Wczesna ciąża może ulec naturalnemu poronieniu przed dniem spodziewanej miesiączki. Dlatego zaleca się ponowne przeprowadzenie testu w dniu spodziewanej miesiączki.