

# Salvequick Foot Care Mix, plastry na pęcherze i otarcia, 10 sztuk



Cena: 39,79 zł

## Opis słownikowy

Marka	Salvequick
Postać	plastry
Producent	Cederroth
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Salvequick Foot Care Mix, plastry na pęcherze i otarcia, 10 sztuk

Plastry Salvequick Foot Care Mix działają jak dodatkowa warstwa skóry. Idealnie przylegają i pomagają zachować odpowiednią wilgotność, temperaturę i prawidłowe pH. Mogą być także stosowane profilaktycznie, w celu zapobiegania tworzeniu się pęcherzy i otarć, jak również przyspieszają gojenie już istniejących uszkodzeń.

### Skład Salvequick Foot Care Mix, plastry na pęcherze i otarcia, 10 sztuk

Opakowanie zawiera: 10 sztuk plastrów w dwóch rozmiarach:

6 szt. x 40 mm x 61 mm,

4 szt. x 21 mm x 64 mm.

### Działanie Salvequick Foot Care Mix, plastry na pęcherze i otarcia, 10 sztuk

Od wewnętrznej strony:

przyspieszają gojenie

chronią pęcherze i otarcia

pochłaniają nadmiar wilgoci z rany.

Od zewnętrznej strony:

półprzepuszczalna warstwa poliuretanowa pozwala na odparowanie nadmiaru wilgoci zgromadzonej od wewnątrz plastra

zabezpieczają przed brudem, wodą i bakteriami

bardzo dyskretne (w kolorze skóry).

## Dawkowanie Salvequick Foot Care Mix, plastry na pęcherze i otarcia, 10 sztuk

Skóra powinna być całkowicie czysta i sucha.

Usuń ochraniający papier z plastra i przyklej na środek rany.

Trzymaj opatrunek do momentu, aż zacznie naturalnie odpadać. Uchwyć jeden koniec i pociągnij ostrożnie wzdłuż skóry, usuwając opatrunek.

## Przeciwwskazania Salvequick Foot Care Mix, plastry na pęcherze i otarcia, 10 sztuk

Nie stosuj na zakażone rany.

## Informacje dodatkowe Salvequick Foot Care Mix, plastry na pęcherze i otarcia, 10 sztuk

Chorzy na cukrzycę powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem plastra.

Przechowuj w suchym miejscu w temp. pokojowej.

Plaster może być używany tylko przez 1 osobę.

Ponowne użycie plastra zwiększa ryzyko zakażenia.