

Seni Kids Junior Extra, pieluchomajtki dla dzieci 15-30 kg, 30 szt.



Cena: 37,89 zł

Opis słownikowy

Marka	Seni
Postać	pieluchomajtki
Producent	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Seni Kids Junior Extra, pieluchomajtki dla dzieci 15-30 kg, 30 szt.

Seni Kids Junior Extra to pieluchomajtki dla dzieci z inkontynencją, które wyrosły już z tradycyjnych dziecięcych pieluszek, a wciąż potrzebują pewnego i komfortowego zabezpieczenia. Dla dzieci aktywnych jak również wymagających opieki.

Działanie Seni Kids Junior Extra, pieluchomajtki dla dzieci 15-30 kg, 30 szt.

Seni Kids Junior Extra Pieluchomajtki dla dzieci zapewniają swobodę ruchu a także bezpieczeństwo (elastyczny ściągacz taliowy w tylnej części pieluchomajtek plus elastyczne rzepy) oraz:

- wygodę i poczucie suchości;
- redukcję nieprzyjemnego zapachu;
- ochronę przed wyciekami;
- swobodne oddychanie skóry;
- minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych;
- możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy;
- waga dziecka: 15 - 30 kg.

Dawkowanie Seni Kids Junior Extra, pieluchomajtki dla dzieci 15-30 kg, 30 szt.

Pieluchomajtki przed założeniem należy **aktywować**. Dzięki temu, staną się bardziej miękkie, a wkład bardziej chłonny.

Rozłóż pieluchomajtki, chwyć je za dwa końce i lekko pociągnij.
Złóż pieluchomajtki wzdłuż na pół i lekko rozciągnij.

Zakładanie pieluchomajtek Seni Kids Junior Extra

Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg dziecka. Obróć dziecko na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych podłóż z tyłu pod dziecko aktywowane wcześniej pieluchomajtki. Połóż dziecko z powrotem na plecach, wyprostuj jego nogi, a następnie wyciągnij podwinięte skrzydło pieluchomajtek.

Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza.

Zapnij pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia. Przyczep je lekko skośnie do góry.

Górne przylepcorzepy przyklej dopasowując pieluchomajtki do talii.

Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i odpowiednio przylega do ciała oraz czy osłonki boczne nie są zwinięte. Ważne jest aby w żadnym miejscu pielucha nie wpijała się w ciało.

Przeciwwskazania Seni Kids Junior Extra, pieluchomajtki dla dzieci 15-30 kg, 30 szt.

Nie wyrzucaj zużytych pieluchomajtek do kosza na śmieci.

Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Informacje dodatkowe Seni Kids Junior Extra, pieluchomajtki dla dzieci 15-30 kg, 30 szt.

Pieluchomajtki testowane dermatologicznie.

Polski producent.

Wyrób medyczny bez lateksu, chloru i kompozycji zapachowej.