

Seni Lady Slim Extra, wkładki urologiczne, 15 szt.

Cena: 16,19 zł



Opis słownikowy

Marka	Seni
Postać	wkładki
Producent	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Seni Lady Slim Extra, wkładki urologiczne, 15 szt.

Seni Lady Slim Extra to oddychające, cienkie wkładki urologiczne stworzone z myślą o kobietach prowadzących aktywny tryb życia, ceniących sobie komfort i bezpieczeństwo połączone z dyskrecją. Stanowią skuteczną ochronę w przypadku lekkiego nietrzymania moczu.

Poziomą chłonności 4/6.

Skład Seni Lady Slim Extra, wkładki urologiczne, 15 szt.

Zawartość

Wszystkie wkładki pakowane są w indywidualną, włókninową saszetkę gwarantującą jeszcze większe poczucie higieny.
Rozmiar: 14x19,5 cm

Działanie Seni Lady Slim Extra, wkładki urologiczne, 15 szt.

Anatomiczny kształt idealnie dopasowujący się do ciała.
Redukcja nieprzyjemnego zapachu.
Pakowane pojedynczo.
Oddychający materiał.

Łatwe w użyciu.
Dobre mocowanie do bielizny.
Uczucie suchości i ochrona przed przeciekaniem.
Dyskrecja i komfort w jednym.
Dodatkowe zabezpieczenie w postaci bocznych osłonek.
Produkt testowany dermatologicznie.
Chłonność: 4/6 kropel.
Miękkie i delikatne.
Bez lateksu.
Rozmiar: extra.
Wymiary: 14 cm x 29,5 cm.
Produkt jednorazowy.

Wskazania Seni Lady Slim Extra, wkładki urologiczne, 15 szt.

Wkładki urologiczne Seni Lady Extra to ochrona dla kobiet z lekkim i średnim nietrzymaniem moczu.

Dawkowanie Seni Lady Slim Extra, wkładki urologiczne, 15 szt.

Wyciągnąć wkładkę z opakowania i oderwać papier z paska klejowego, umieszczonego na jej spodniej części.
Przykleić wkładkę do bielizny w odpowiednim miejscu (wkładka powinna być przyklejona prosto, aby zapewnić komfort i wygodę podczas jej noszenia).
Wymieniać w zależności od indywidualnych potrzeb.
Zużytej wkładki nie należy wyrzucać do toalety.

Informacje dodatkowe Seni Lady Slim Extra, wkładki urologiczne, 15 szt.

Nie wrzucać do toalety.
Chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Należy pamiętać o odpowiednio dobranym rozmiarze wkładki urologicznej.

Wyprodukowano w Polsce.