

## Seni Man super, wkładki urologiczne, 20 szt.

Cena: 29,99 pln



### Opis słownikowy

Producent TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SA

### Opis produktu

#### Opis

#### Opis

Seni Man Super, wkładki urologiczne.

#### Działanie

Oddychające, anatomiczne wkładki urologiczne Seni Man Super stanowią doskonałe zabezpieczenie przy średnim nietrzymaniu moczu oraz zapewniają:

- idealne dopasowanie do ciała
- redukcję nieprzyjemnego zapachu moczu
- ochronę przed wyciekami
- szybką i pewną dystrybucję wilgoci
- swobodne oddychanie skóry
- zminimalizowane ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych
- łatwe i pewne mocowanie do bielizny
- gwarancję dyskrecji i komfortu.

#### Wskazania

Wkładki urologiczne Seni Man Super stworzone zostały z myślą o mężczyznach prowadzących aktywny tryb życia, ceniących sobie komfort i bezpieczeństwo połączone z dyskrecją.

Wkładki urologiczne Seni Man Super stanowią doskonałe zabezpieczenie przy średnim nietrzymaniu moczu.

## Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Wyjmij wkładkę z opakowania.
2. Odklej papier z paska klejowego, umieszczony na spodniej części wkładki.
3. Rozłóż fałdy boczne wkładki tak, aby wkładka uformowała się w kształt łódki.
4. Przymocuj wkładkę wewnątrz bielizny tak, aby wygodnie włożyć członek do wkładki.

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób:

- Rozchyl tylko górną część fałd bocznych, tak aby członek włożyć do wkładki, a mosznę pozostawić na zewnątrz.
- Rozchyl fałdy wkładki i włóż całe genitalia w powstałym zagłębieniu.

**Uwaga:** Nie stosuj wkładki, jeśli używasz luźnej bielizny typu bokserki.

Nie wyrzucaj wkładki do toalety – zużytą wkładkę wyrzuć do kosza na śmieci.