

## Seni Super Plus, pieluchomajtki rozmiar S Small, 10 szt.

Cena: 20,69 zł



### Opis słownikowy

Marka	Seni
Postać	pieluchomajtki
Producent	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Seni Super Plus, pieluchomajtki rozmiar S Small, 10 szt.

Wyrób medyczny Super Seni Plus to klasyczne pieluchomajtki w rozmiarze S, przeznaczone dla osób cierpiących na nietrzymanie moczu w stopniu średnim lub ciężkim.

Pieluchomajtki Super Seni Plus posiadają drugi z czterech stopni chłonności (tzw. chłonność dzienna) i rozmiar S: 55-80 cm obwodu. Produkt testowany dermatologicznie i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

#### Skład Seni Super Plus, pieluchomajtki rozmiar S Small, 10 szt.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera 10 sztuk pieluchomajtek w rozmiarze małym - S.

#### Działanie Seni Super Plus, pieluchomajtki rozmiar S Small, 10 szt.

Produkt doskonale dopasowuje się do kształtu ciała. Poprzez redukcję nieprzyjemnego zapachu i szybką dystrybucję wilgoci do wnętrza wkładu chłonnego zapewnia uczucie suchości i komfortu.

Indykator wilgotności znajdujący się na wyrobie informuje o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności zmiany.

#### Wskazania Seni Super Plus, pieluchomajtki rozmiar S Small, 10 szt.

Produkt przeznaczony dla osób mobilnych i leżących, cierpiących na nietrzymanie moczu o średnim lub ciężkim stopniu nasilenia lub na inkontynencję kałową.

## Dawkowanie Seni Super Plus, pieluchomajtki rozmiar S Small, 10 szt.

Przed założeniem pieluchy należy ją aktywować, czyli w 2 krokach przygotować do użycia. Dzięki tym czynnościom chłonność wyrobu zostanie maksymalnie wykorzystana.

1. Rozłóż pieluchę, chwyć ją za dwa końce i lekko pociągnij.
2. Złóż pieluchę wzdłuż na pół. Uwaga: Nie skręcaj wyrobu!

Zakładanie na stojąco – samodzielnie lub z pomocą opiekuna:

3. Aktywowane pieluchomajtki włóż między nogi trzymając produkt ułożony w formie łódki.
4. Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała.
5. Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepty, dopasowując pieluchomajtki do talii.
6. Upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinione i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.

Zakładanie na osobę leżącą:

3. Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego. Jeśli stoisz po prawej stronie chorego, zegnij jego lewą nogę, jeśli stoisz po jego lewej stronie – zegnij nogę prawą.
4. Obróć chorego na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych podłóż z tyłu pod chorego aktywowane wcześniej pieluchomajtki.
5. Połóż chorego na plecach, wyprostuj jego nogi i wyciągnij podwinione skrzydło pieluchomajtek.
6. Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza.
7. Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepty, dopasowując pieluchomajtki do talii.
8. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinione i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.

## Informacje dodatkowe Seni Super Plus, pieluchomajtki rozmiar S Small, 10 szt.

Produkt jednorazowego użytku, wyrzucać do kosza na śmieci.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.