

# Seni Super Quatro, pieluchomajtki rozmiar XL Extra Large, 10 szt.

Cena: 46,39 zł



## Opis słownikowy

Marka	Seni
Postać	pieluchomajtki
Producent	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Seni Super Quatro, pieluchomajtki rozmiar XL Extra Large, 10 szt.

Wyrób medyczny Super Seni Quatro to pieluchomajtki przeznaczone dla osób stale leżących lub poruszających się przy pomocy opiekuna, cierpiących z powodu nietrzymania moczu w stopniu bardzo ciężkim i/lub z powodu inkontynencji kałowej.

### Skład Seni Super Quatro, pieluchomajtki rozmiar XL Extra Large, 10 szt.

#### Zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się 10 sztuk pieluchomajtek.

### Działanie Seni Super Quatro, pieluchomajtki rozmiar XL Extra Large, 10 szt.

Wyrób medyczny Super Seni Quatro to uniwersalne pieluchomajtki zapewniające maksymalny komfort użytkownika. Produkt wykonany został z materiałów umożliwiających skórze swobodne oddychanie, natomiast elementy z elastycznej przędzy zmniejszają ryzyko powstawania reakcji alergicznych. Wyrób medyczny bardzo szybko dystrybuje wilgoć do wnętrza wkładu chłonnego, gwarantując utrzymanie suchości, natomiast wykorzystany w produkcji superabsorbent wykazuje działanie antybakteryjne - ogranicza rozwój bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach. Dzięki elastycznemu ściągaczowi taliowemu oraz przylepcorzepom pieluchomajtki dobrze dostosowują się do kształtów ciała, zapewniając dyskrecję użytkownika, natomiast osłonki boczne wykonane z hydrofobowej włókniny

dotatkowo zabezpieczają przed przeciekaniem. Produkt posiada także wmontowany podwójny wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchomajtek.

Pieluchomajtki wykazują się najwyższą spośród produktów Seni chłonnością: 9/9. Jest to ostatni z czterech stopni chłonności - tzw. chłonność nocna. Rozmiar XL dedykowany jest dla osób o obwodzie 130 - 170 cm.  
Wyrób testowany dermatologicznie, rekomendowany jest przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

## Wskazania Seni Super Quatro, pieluchomajtki rozmiar XL Extra Large, 10 szt.

Wyrób medyczny przeznaczony jest dla osób o ograniczonej mobilności, które poruszają się z pomocą opiekuna oraz dla pacjentów niemobilnych, z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu i/lub z inkontynencją kałową, szczególnie polecane np. przy cukrzycy, przyjmowaniu leków moczopędnych lub zwiększonej ilości płynów.

## Dawkowanie Seni Super Quatro, pieluchomajtki rozmiar XL Extra Large, 10 szt.

Przed założeniem pieluchy należy ją aktywować, czyli w 2 krokach przygotować do użycia. Dzięki tym czynnościom chłonność wyrobu zostanie maksymalnie wykorzystana.

1. Rozłóż pieluchę, chwyć ją za dwa końce i lekko pociągnij.
2. Złóż pieluchę wzdłuż na pół. Uwaga: Nie skręcaj wyrobu!

### Zakładanie na stojąco – samodzielnie lub z pomocą opiekuna:

3. Aktywowane pieluchomajtki włóż między nogi trzymając produkt ułożony w formie łódki (możesz włożyć pieluchomajtki od przodu lub od tyłu – aby odciążać plecy, wybierz sposób, który jest dla Ciebie wygodniejszy w danej sytuacji).
4. Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała (zwróć uwagę, aby indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa. Podopieczny może pomóc w zakładaniu pieluchomajtek przytrzymując je z przodu na podbrzuszu).
5. Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.
6. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.
7. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci.

### Zakładanie na osobę leżącą:

3. Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego (jeśli stoisz po prawej stronie chorego, zegnij jego lewą nogę, jeśli stoisz po jego lewej stronie – zegnij nogę prawą).
4. Obróć chorego na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych podłóż z tyłu pod chorego aktywowane wcześniej pieluchomajtki (pamiętaj o tym, aby podwinąć skrzydło pieluchomajtek, co umożliwi wyjęcie ich spod chorego po jego obróceniu na plecy. Zwróć uwagę, aby indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa).
5. Połóż chorego na plecach, wyprostuj jego nogi i wyciągnij podwinięte skrzydło pieluchomajtek.
6. Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza.
7. Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.
8. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.
9. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci.

Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety!