

Setopress, bandaż do kompresjoterapii 10 cm x 3,5 m, 12 szt.

Cena: 22,09 zł



Opis słownikowy

Marka	Setopress
Postać	bandaż
Producent	Molnlycke
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Setopress, bandaż do kompresjoterapii 10 cm x 3,5 m, 12 szt.

Wyrób medyczny Setopress to bandaż uciskowy do stosowania w leczeniu owrzodzenia żylnego goleni.

Skład Setopress, bandaż do kompresjoterapii 10 cm x 3,5 m, 12 szt.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera 12 bandaży uciskowych o wymiarach 10 cm x 3,5 m.

Działanie Setopress, bandaż do kompresjoterapii 10 cm x 3,5 m, 12 szt.

Wyrób jest lekki i cienki, dzięki czemu nie przeszkadza w codziennych czynnościach i umożliwia noszenie obuwia.

Możliwość prania.

Dwa poziomy kompresji: 30 mmHg i 40 mmHg w stawie skokowym.

Wskazania Setopress, bandaż do kompresjoterapii 10 cm x 3,5 m, 12 szt.

Produkt przeznaczony do stosowania w kompresoterapii schorzeń kończyn np. owrzodzenia goleni.

Dawkowanie Setopress, bandaż do kompresjoterapii 10 cm x 3,5 m, 12 szt.

Aby uzyskać odpowiednią siłę ucisku należy naciągnąć bandaż tak, aby nadrukowane na nim prostokąty przyjęły postać kwadratów. Brązowe prostokąty po jednej stronie bandaża Setopress po odpowiednim naciągnięciu zapewniają ucisk 40 mmHg w stawie skokowym, natomiast zielone prostokąty po drugiej stronie bandaża po naciągnięciu zapewniają ucisk 30 mmHg w stawie skokowym.

Przeciwwskazania Setopress, bandaż do kompresjoterapii 10 cm x 3,5 m, 12 szt.

Jeśli stosowanie kompresji sprawia trudność na początku można stosować umiarkowany ucisk i stopniowo go zwiększać.

Informacje dodatkowe Setopress, bandaż do kompresjoterapii 10 cm x 3,5 m, 12 szt.

Uwagi i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.