

## Stoppery przeciwhałasowe MWD-12S, 1 op. (2 pary)



Cena: 2,89 zł

### Opis słownikowy

Postać	stopery
Producent	Stanmark
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Stoppery przeciwhałasowe MWD-12S, 1 op. (2 pary)

Wkładki do uszu Stopper MWD-12S są wykonane z waty bawełniano-wiskozowej nasyconej masą woskową. Są uformowane w stożki. Prawidłowo zastosowane tłumią hałas, jaki występuje w domu, w biurze, hotelu, szpitalu itp. Pozwalają na wyciszenie dźwięków przeszkadzających w skupieniu lub w zaśnięciu.

### Skład Stoppery przeciwhałasowe MWD-12S, 1 op. (2 pary)

bawełna bielona przesączana mieszaniną wosków, parafiny i wazeliny, barwnik.

#### Zawartość opakowania

Wkładki do uszu Stopper MWD-12S - 2 pary

### Działanie Stoppery przeciwhałasowe MWD-12S, 1 op. (2 pary)

### Cechy wkładek dousznych **Stopper MWD-12S**:

- Wykonane z waty nasyconej woskiem,

- Uformowane w stożek,
- Masa wkładek mięknie pod wpływem ciepła dłońmi i daje się ugniatać kształtowa palcami, a w czasie użytkowania doskonale dostosowuje się do każdego kształtu kanału słuchowego. Ma zdolność pochłaniania zabrudzeń i pyłów.
- Wkładki można używać wielokrotnie, dopóki masa jest miękka i lepka. Nie wymagają czyszczenia.
- Testowanie hałasu:

SNR	H	M
26 dB	29 dB	22 dB

### Wskazania Stoppery przeciwhałasowe MWD-12S, 1 op. (2 pary)

Do ochrony uszu przed nadmiernym hałasem lub uciążliwymi dźwiękami uniemożliwiającymi skupienie lub spokojny sen. Nadają się również do ochrony uszu przed wodą, wiatrem, przeciągami.

### Dawkowanie Stoppery przeciwhałasowe MWD-12S, 1 op. (2 pary)

Przed założeniem wkładkę Stopper MWD-12S należy zmiękczyć przez ogrzanie w umytych dłoniach.

Wkładkę włożyć do ucha i doszczelnić przez docisk palcem.

Naciśnięcie dolnej części mażowiny usznej ułatwi wyjęcie wkładki.

### Informacje dodatkowe Stoppery przeciwhałasowe MWD-12S, 1 op. (2 pary)

Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.

## Galeria

