

Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, 30 szt.

Cena: 82,09 zł



Opis słownikowy

Marka	Seni
Postać	pieluchomajtki
Producent	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, 30 szt.

Wyrób medyczny Super Seni, pieluchomajtki, rozmiar L, 30 szt. jest polecany dla kobiet oraz mężczyzn w przypadku średniego stopnia nietrzymania moczu, zarówno dla osób samodzielnych, jak i unieruchomionych, wymagających opieki.

Pieluchomajtki zostały wykonane z miękkich, oddychających materiałów, które minimalizują ryzyko powstawania odparzeń, odleżyn i podrażnień skóry. Przylepcorzepy umożliwiają wygodne zakładanie pieluchy, mogą być wielokrotnie odpinane i zapinane. Produkt posiada wskaźnik wilgotności, który pokazuje, kiedy konieczna jest zmiana zużytego wyrobu.

Chłonność: 6/9 – pierwszy z czterech poziomów chłonności, tzw chłonność dzienna.

Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Skład Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, 30 szt.

Wyrób nie zawiera lateksu.

Zawartość opakowania

Super Seni, pieluchomajtki, rozmiar L, 30 szt. dla osób posiadających w obwodzie od 100 cm do 150 cm.

Działanie Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, 30 szt.

Super Seni to klasyczne, uniwersalne pieluchomajtki dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu oraz inkontynencją kałową.

Specjalna włóknina rozprowadzająca, która znajduje się we wkładzie chłonnym umożliwia dokładniejsze i szybsze rozprowadzanie wilgoci wewnątrz wkładu, dając poczucie suchości i komfortu.

Wykonane z hydrofobowej włókniny osłonki boczne, które idealnie dopasowują się do ciała, zapobiegają przeciekaniu moczu na zewnątrz pieluchomajtek. Użyty w wyrobie superabsorbent zwiększa chłonność pieluchy oraz wykazuje właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zapobiega przykremu zapachowi.

Dzięki specjalnej strukturze warstwy zewnętrznej wyrobu możliwa jest swobodna cyrkulacja powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu wilgoci. Wpływa to na zmniejszenie ilości odparzeń i podrażnień oraz minimalizuje prawdopodobieństwo powstawania odleżyn. W skrzydłach bocznych pieluchomajtek zastosowano specjalną, oddychającą włókninę, która zapewnia swobodną cyrkulację powietrza w części biodrowej produktu.

Połączenie przylepcorzepów i elastycznego ściągacza w talii umożliwia perfekcyjne dopasowanie wyrobu do ciała oraz umożliwia swobodę ruchów. Po odpięciu przylepcorzepy nie odkształcają się, mogą być użyte wielokrotnie. Dzięki anatomicznemu kształtowi produkt dostosowuje się do ciała użytkownika zmniejszając ryzyko otarć mechanicznych.

Zwężony wkład chłonny w obrębie kroku, z obrzeży do części środkowej sprawia, że wyrób jest mniej zauważalny przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej chłonności. Indykator wilgotności informuje o napełnieniu pieluchy, a tym samym sugeruje konieczność zmiany pieluchomajtek.

Produkt testowany dermatologicznie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Chłonność: 6/9 – pierwszy z czterech poziomów chłonności, tzw chłonność dzienna.

Rozmiar L – obwód pasa i bioder mieszczący się w przedziale 100 - 150 cm.

Wskazania Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, 30 szt.

Produkt przeznaczony dla osób aktywnych, samodzielnych jak również dla osób leżących, wymagających opieki, ze średnim stopniem nietrzymania moczu, o obwodach pasa i bioder mieszczących się w przedziale 100 - 150 cm.

Wskazania

Super Seni, klasyczne oddychające pieluchomajtki, to dobre i sprawdzone zabezpieczenie przeznaczone zarówno dla osób aktywnych, jak i dla tych o ograniczonej mobilności. Pieluchomajtki Super Seni przeznaczone są dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu. Super Seni mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej.

Dawkowanie Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, 30 szt.

Przed założeniem pieluchy należy ją aktywować, czyli w 2 krokach przygotować do użycia. Dzięki tym czynnościom chłonność wyrobu zostanie maksymalnie wykorzystana.

- Rozłóż pieluchę, chwyć ją za dwa kąty i lekko pocignij.
- Złóż pieluchę wzdłuż na pół. Uwaga: Nie skracaj wyrobu!

Założenie na stojąco – samodzielnie lub z pomocą opiekuna:

- Aktywowane pieluchomajtki wódmędzy nogi trzymając produkt ułożony w formie łożki.

- Uwagi dla opiekuna: możesz włożyć pieluchomajtki od przodu lub od tyłu – aby odciążyć plecy, wybierz sposób, który jest dla Ciebie wygodniejszy w danej sytuacji.
- Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała.
- Uwagi dla opiekuna: Zwróć uwagę, aby wskaźnik wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa. Podopieczny może pomóc w zakładaniu pieluchomajtek przytrzymując je z przodu na podbrzuszu.
- Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.
- Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.
- Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci.
- Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety!

Zakładanie na osobę leżącą:

- Stać z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego.
- Uwaga: jeżeli stoisz po prawej stronie chorego, zegnij jego lewą nogę, jeżeli stoisz po jego lewej stronie – zegnij nogę prawą.
- Obróć chorego na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych podłóż z tyłu pod chorego aktywowane wcześniej pieluchomajtki.
- Uwaga: Pamiętaj o tym, aby podwinąć skrzydło pieluchomajtek, co umożliwi wyjście ich spod chorego po jego obróceniu na plecy. Zwróć uwagę, aby wskaźnik wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa.
- Położony chorego na plecach, wyprostuj jego nogi i wyciągnij podwinęte skrzydło pieluchomajtek.
- Wyciągnij przednie części pieluchomajtek i dopasuj je do krocza.
- Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.
- Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.
- Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci.
- Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety!

Galeria

