

## Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XS, 10 szt.



Cena: 20,09 zł

### Opis słownikowy

Marka	Seni
Postać	pieluchomajtki
Producent	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XS, 10 szt.

Wyrób medyczny Super Seni, pieluchomajtki, rozmiar XS, 10 szt. jest polecany dla kobiet oraz mężczyzn w przypadku średniego stopnia nietrzymania moczu i/lub inkontynencji kałowej. To klasyczny, uniwersalny wyrób chłonny, polecany zarówno dla osób mobilnych, jak i unieruchomionych. Pieluchomajtki są wykonane z miękkich, oddychających materiałów, które minimalizują ryzyko powstawania odparzeń i podrażnień skóry. Przylepcorzepy umożliwiają wygodne zakładanie pieluchy i mogą być wielokrotnie odpinane i zapinane. Mają wskaźnik wilgotności, który pokazuje, kiedy konieczna jest zmiana zużytego wyrobu.

Chłonność: 6/9 – pierwszy z czterech poziomów chłonności, tzw chłonność dzienna.

Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Produkt testowany dermatologicznie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Chłonność: 6/9 – pierwszy z czterech poziomów chłonności, tzw chłonność dzienna.

Rozmiar XS – obwód pasa i bioder mieszczący się w przedziale 40 - 60 cm.

#### Skład Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XS, 10 szt.

Wyrób nie zawiera lateksu.

#### Zawartość opakowania

Super Seni, pieluchomajtki, rozmiar XS, 10 szt.

## Działanie Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XS, 10 szt.

Super Seni to klasyczne, uniwersalne pieluchomajtki dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu oraz inkontynencją kałową. Specjalna włóknina rozprzewadzająca, która znajduje się we wkładzie chłonnym umożliwia dokładniejsze i szybsze rozprzewadzenie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewniając tym samym komfort i poczucie suchości.

Wykonane z hydrofobowej włókniny osłonki boczne, które idealnie dopasowują się do ciała, zapobiegają przeciekaniu wilgoci na zewnątrz produktu. Użyty w pieluchomajtkach superabsorbent zwiększa chłonność pieluchy oraz wykazuje właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zapobiega przykreemu zapachowi.

Dzięki specjalnej strukturze warstwy zewnętrznej produktu możliwa jest swobodna cyrkulacja powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu wilgoci, co zmniejsza ilość odparzeń i podrażnień oraz minimalizuje prawdopodobieństwo powstawania odleżyn. W skrzydłach bocznych wyrobu zastosowano specjalną, oddychającą włókninę, która zapewnia swobodną cyrkulację powietrza w części biodrowej produktu.

Połączenie elastycznego ściągacza w talii i przylepcorzepów umożliwia idealne dopasowanie do ciała oraz swobodę ruchów. Po odpięciu przylepcorzepy nie odkształcają się, mogą być użyte wielokrotnie. Dzięki anatomicznemu kształtowi wyrób dopasowuje się do ciała użytkownika zmniejszając ryzyko otarć mechanicznych.

Zwężony wkład chłonny w obrębie kroku, z obrzeży do części środkowej sprawia, że produkt jest mniej zauważalny przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu chłonności. Indykator wilgotności informuje o napełnieniu pieluchy, a tym samym sugeruje konieczność zmiany pieluchomajtek.

## Wskazania Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XS, 10 szt.

Super Seni, klasyczne oddychające pieluchomajtki, to dobre i sprawdzone zabezpieczenie przeznaczone zarówno dla osób aktywnych, jak i dla tych o ograniczonej mobilności. Pieluchomajtki Super Seni przeznaczone są dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu. Super Seni mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej.

### Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony dla osób aktywnych, samodzielnych jak również dla osób leżących, wymagających opieki, ze średnim stopniem nietrzymania moczu, o obwodach pasa i bioder mieszczących się w przedziale 40 - 60 cm.

## Dawkowanie Super Seni, pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XS, 10 szt.

Przed założeniem pieluchy należy ją aktywować, czyli w 2 krokach przygotować do użycia. Dzięki tym czynnościom chłonność wyrobu zostanie maksymalnie wykorzystana.

Rozłóż pieluchę, chwyć ją za dwa końce i lekko pociągnij.  
Złóż pieluchę wzdłuż na pół. Uwaga: Nie skręcaj wyrobu!

### Zakładanie na stojąco – samodzielnie lub z pomocą opiekuna:

Aktywowane pieluchomajtki włóż między nogi trzymając produkt ułożony w formie łódki.

Uwagi dla opiekuna: możesz włożyć pieluchomajtki od przodu lub od tyłu – aby odciążać plecy, wybierz sposób, który jest dla Ciebie wygodniejszy w danej sytuacji.

Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała.

Uwagi dla opiekuna: Zwróć uwagę, aby indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa. Podopieczny może pomóc w zakładaniu pieluchomajtek przytrzymując je z przodu na podbrzuszu.

Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.

Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.

Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci.

Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety!

#### Zakładanie na osobę leżącą:

Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego.

Uwaga: jeśli stoisz po prawej stronie chorego, zegnij jego lewą nogę, jeśli stoisz po jego lewej stronie – zegnij nogę prawą.

Obróć chorego na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych podłóż z tyłu pod chorego aktywowane wcześniej pieluchomajtki.

Uwaga: Pamiętaj o tym, aby podwinąć skrzydło pieluchomajtek, co umożliwi wyjęcie ich spod chorego po jego obróceniu na plecy. Zwróć uwagę, aby indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa.

Położ chorego na plecach, wyprostuj jego nogi i wyciągnij podwinięte skrzydło pieluchomajtek.

Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do kroczka.

Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.

Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.

Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci.

Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety!