

## Super Seni Plus, pieluchomajtki rozmiar L Large, 30 szt.



Cena: 93,59 zł

### Opis słownikowy

Marka	Seni
Postać	pieluchomajtki
Producent	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Super Seni Plus, pieluchomajtki rozmiar L Large, 30 szt.

Wyrób medyczny Super Seni Plus to pieluchomajtki w rozmiarze L, przeznaczone do użytku dla osób mobilnych i leżących, cierpiących z powodu nietrzymania moczu i/lub inkontynencji kałowej średniego i ciężkiego stopnia. Pieluchomajtki Super Seni Plus posiadają drugi z czterech stopni chłonności (tzw. chłonność dzienna) i rozmiar L: 100 - 150 cm obwodu.

#### Skład Super Seni Plus, pieluchomajtki rozmiar L Large, 30 szt.

Produkt wykonany został z miękkich i oddychających materiałów, nie zawiera lateksu.

#### Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera 30 sztuk pieluchomajtek.

#### Działanie Super Seni Plus, pieluchomajtki rozmiar L Large, 30 szt.

Super Seni Plus zapewniają długotrwałe uczucie suchości dzięki szybkiemu i równomiernemu rozprowadzeniu wilgoci wewnątrz wkładu superchłonnego wkładu. Właściwości antybakteryjne superabsorbentu hamują rozwój drobnoustrojów i niwelują powstawanie nieprzyjemnego zapachu, natomiast specjalne osłonki boczne dodatkowo chronią przed przeciekaniem. Struktura wyroby umożliwia swobodny przepływ powietrza, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstania odparzeń, odleżyn i podrażnień delikatnej skóry. Elementy wykonane z elastycznej przędzy minimalizują ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, co sprawia, że produkt jest odpowiedni także dla

osób o wrażliwej skórze. Ponadto produkt zawiera wbudowany indykator wilgoci informujący o konieczności wymiany. Elastyczny ściągacz taliowy i przylepce umożliwiają dokładne dopasowanie pieluchomajtek do ciała, co zwiększa komfort i zapewnia dyskrecję użytkowania.

## Wskazania Super Seni Plus, pieluchomajtki rozmiar L Large, 30 szt.

Wyrób medyczny polecany jest zarówno osobom mobilnym, jak i leżącym, cierpiącym z powodu nietrzymania moczu i/lub inkontynencji o średnim i ciężkim stopniu nasilenia.

## Dawkowanie Super Seni Plus, pieluchomajtki rozmiar L Large, 30 szt.

Przed założeniem pieluchy należy ją aktywować, czyli w 2 krokach przygotować do użycia. Dzięki tym czynnościom chłonność wyrobu zostanie maksymalnie wykorzystana.

1. Rozłóż pieluchę, chwyć ją za dwa kąty i lekko pociągnij.
2. Złóż pieluchę wzdłuż na pół. Uwaga: Nie skracaj wyrobu!

### Założenie na stojąco – samodzielnie lub z pomocą opiekuna:

3. Aktywowane pieluchomajtki wódką między nogi trzymając produkt ułożony w formie wódkę.
4. Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała.
5. Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skłonie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.
6. Upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.

### Założenie na osobę leżącą:

3. Stać z boku wódkę i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego. Jeśli stoisz po prawej stronie chorego, zegnij jego lewą nogę, jeśli stoisz po jego lewej stronie – zegnij nogę prawą.

4. Obróć chorego na bok i po dokonaniu czynności pielęgnowczych podóń z tyłu pod chorego aktywowane wcześniej pieluchomajtki.
5. Poóń chorego na plecach, wyprostuj jego nogi i wycińnij podwinięte skrzydła pieluchomajtek.
6. Wycińnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza.
7. Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.
8. Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu pielucha nie wpija się w ciało.

### Informacje dodatkowe Super Seni Plus, pieluchomajtki rozmiar L Large, 30 szt.

Produkt jednorazowego użytku, po wykorzystaniu pieluchomajtki zwin i wyrzuć do kosza na śmieci.

Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety!

Produkt testowany dermatologicznie i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.