

Suprasorb A + Ag, przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia 10 cm x 10 cm, 1 sztuka



Cena: 18,53 zł

Opis słownikowy

Marka	Suprasorb
Postać	opatrunek
Producent	Lohmann & Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Srebro

Opis produktu

Informacje podstawowe Suprasorb A + Ag, przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia 10 cm x 10 cm, 1 sztuka

Opatrunek Suprasorb A + Ag o wymiarach 10 x 10 cm (z alginianem wapnia i srebrem) oczyszcza ranę i działa przeciwbakteryjnie. Jony srebra działają bezpośrednio na powierzchni rany, co znacznie przyspiesza gojenie i eliminuje zarazki. Opatrunek jest chłonny, a zawarty w nim alginian wapnia ułatwia wytwarzanie żelu, dzięki któremu opatrunek dopasowuje się do rany. Żel zamyka i eliminuje zarazki, a także pozwala na bezpieczną zmianę opatrunku.

Skład Suprasorb A + Ag, przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia 10 cm x 10 cm, 1 sztuka

Przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia ze srebrem.

Działanie Suprasorb A + Ag, przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia 10 cm x 10 cm, 1 sztuka

oczyszcza ranę i redukuje obciążenie bakteryjne

szybkie działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum, także przeciw MRSA i VRE

zdolność absorpcji dużej ilości wysięku

naturalny proces oczyszczania rany

łatwo dopasowuje się do łożyska rany (szybki proces przekształcania się w żel)

Wskazania Suprasorb A + Ag, przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia 10 cm x 10 cm, 1 sztuka

Przewlekłe owrzodzenia,
Epidermolysis bullosa

Dawkowanie Suprasorb A + Ag, przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia 10 cm x 10 cm, 1 sztuka

Zmiana opatrunku: opatrunek może pozostawać na ranie do 5-7 dni (w zależności od stopnia wysięku i stanu opatrunku wtórnego).

Informacje dodatkowe Suprasorb A + Ag, przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia 10 cm x 10 cm, 1 sztuka

Nie aplikować poza brzegi rany.
W przypadku ran zakażonych: opatrunek należy zmieniać codziennie.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.