

Sutricon CC, plastry silikonowe na blizny 5 cm x 30 cm z wit. E, 5 sztuk

Cena: 135,29 zł



Opis słownikowy

Marka	Sutricon
Postać	plastry
Producent	Verco
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Witamina E

Opis produktu

Informacje podstawowe Sutricon CC, plastry silikonowe na blizny 5 cm x 30 cm z wit. E, 5 sztuk

Plastry silikonowe z witaminą E, do stosowania wspomagająco przy leczeniu blizn po cesarskim cięciu. Efektywne w leczeniu świeżych i dojrzałych blizn (nawet do 9 lat).

Zmniejszają, rozjaśniają i wygładzają bliznę oraz redukują dyskomfort związany z blizną (ból, swędzenie, uczucie ciągnięcia).

Elastyczne, dopasowują się do anatomicznych kształtów ciała.

Charakteryzują się wysoką przyczepnością, dzięki czemu mogą być aplikowane wielokrotnie.

Są cienkie (0,25 mm) i przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze, wygodne i dyskretne. Dzięki półprzepuszczalnej membranie pozwalają skórze oddychać.

Opakowanie wystarcza na 1-3 miesiące terapii, w zależności od wielkości i rodzaju blizny.

Wymiary: 5 cm x 30 cm.

Skład Sutricon CC, plastry silikonowe na blizny 5 cm x 30 cm z wit. E, 5 sztuk

Żel silikonowy z witaminą E, elastyczna membrana poliuretanowa.

Działanie Sutricon CC, plastry silikonowe na blizny 5 cm x 30 cm z wit. E, 5 sztuk

Poprawia wygląd i elastyczność blizn.

Zawiera wysokiej jakości silikon farmaceutyczny, o właściwości podobnych do zdrowej ludzkiej skóry - jest elastyczny, przepuszcza tlen i zapobiega nadmiernej utracie wody. Dzięki temu plastry zmniejszają dyskomfort związany z blizną (ból, swędzenie, uczucie ciągnięcia). Plastry wzbogacone są o witaminę E, która stymuluje gojenie się ubytków naskórka oraz wspomaga utrzymanie zdrowego wyglądu skóry. Ponadto wspiera utrzymanie właściwego nawilżenia naskórka, dzięki czemu skóra staje się miękka i bardziej elastyczna.

Wskazania Sutricon CC, plastry silikonowe na blizny 5 cm x 30 cm z wit. E, 5 sztuk

Plastry silikonowe Sutricon CC stosowane są przy bliznach po cesarskim cięciu:

w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu,
w zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych (nawet do 9 lat).

Dawkowanie Sutricon CC, plastry silikonowe na blizny 5 cm x 30 cm z wit. E, 5 sztuk

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Plaster można używać po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów.

Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.

Dopasować wielkość plastra do powierzchni blizny. Możliwe jest docięcie plastra w dowolny sposób, uwzględniając margines 5 mm z każdej strony.

Co najmniej raz na dobę plaster należy zdjąć, przemyć bliznę neutralnym mydłem, wysuszyć i ponownie nałożyć ten sam plaster.

Plastry należy zmieniać średnio co 3 do 5 dni. Najlepsze efekty można uzyskać wymieniając plastry co 24 godziny.

Plastra nie należy myć ani zaklejać dodatkowym opatrunkiem.

Przeciwwskazania Sutricon CC, plastry silikonowe na blizny 5 cm x 30 cm z wit. E, 5 sztuk

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Informacje dodatkowe Sutricon CC, plastry silikonowe na blizny 5 cm x 30 cm z wit. E, 5 sztuk

Plastry stosować po całkowitym zagojeniu rany, kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka.

Plastry należy wymieniać regularnie.

Długość terapii wynosi minimum 3 miesiące, przy świeżych bliznach, a przy bliznach starszych nawet powyżej 6 miesięcy. Długość terapii zależy od wielu czynników indywidualnych.

W przypadku dużej blizny po cesarskim cięciu jedno opakowanie Sutricon CC starcza na około 1-3 miesiące kuracji.