

SutriSept, płyn na rany, 500 ml



Cena: 106,79 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------|
| Marka | Sutrissept |
| Postać | płyn |
| Producent | Verco |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |
| Substancja czynna | Poliheksanid |

Opis produktu

Skład SutriSept, płyn na rany, 500 ml

Biguanid poliaminopropylu (poliheksanid) 0.1% i substancje pomocnicze.

Bezbarwny, przezroczysty i niemal bezzapachowy płyn wodny.

Działanie SutriSept, płyn na rany, 500 ml

SutriSept Płyn na rany przeznaczony jest do oczyszczania, irygacji oraz nawilżania ran i oparzeń 1. i 2. stopnia. Dzięki unikalnej kompozycji składników działa oczyszczająco oraz przyspiesza gojenie rany. Płyn izoluje powierzchnię rany od środowiska zewnętrznego, tworząc powłokę ochronną. Przeciwdrobnoustrojowe właściwości płynu zapobiegają tworzeniu się biofilmu bakteryjnego. Płyn powoduje także trwały efekt nawilżenia. Utrzymanie czystości i wilgotności rany zapewnia stabilne środowisko w ranie.

Oprócz oczyszczania rany produkt może być także stosowany w celu ułatwienia zmiany materiałów medycznych, takich jak opatrunki, bandaże itp. Zwilżenie płynem materiałów medycznych, które wyschły i przywarły do rany, ułatwia ich usunięcie.

Wskazania SutriSept, płyn na rany, 500 ml

Oczyszczanie ran i skóry (w tym powstałe w wyniku urazów - przecięcia, rozdrarcia, otarcia, zmiżdżenia, ugryzienia, użądlenia, a także rany chirurgiczne)

Oczyszczanie skóry w okolicy stomii, przetok i ropni oraz miejsc wprowadzenia cewników urologicznych
Irygacja ran,
Nawilżanie ran,
Dezynfekcja materiałów medycznych (opatrunki, bandaże, gaza itp.),
Izolacja powierzchni rany od środowiska zewnętrznego,
Zapobieganie tworzeniu się biofilmu bakteryjnego,
Eliminacja patogennych mikroorganizmów z opatrunku.

Oczyszczanie, i zapobieganie zakażeniu:

ran pooperacyjnych
ran po cesarskim cięciu
ran przewlekłych i zakażonych
oparzeń 1 i 2. stopnia
otarć
zadrapań

Dawkowanie SutriSept, płyn na rany, 500 ml

Instrukcja oczyszczania rany:

dokładnie oczyścić całą ranę i jej okolice produktem Sutrisept Płyn na rany
rany głębokie z rozległą martwicą tkanek przemywać przez 10-15 minut (przez
nałożenie mokrego opatrunku)

w celu optymalnego oczyszczenia rany zaleca się jej moczenie przez co najmniej 15
minut za pomocą całkowicie zmoczonego kompresu
nie należy rozcieńczać płynu

Stosowanie na opatrunki i bandaże:

całkowicie namoczyć opatrunki i bandaże, które przywarły do powierzchni rany, płynem
i odczekać 1 - 5 minut, aby zmiękły, po czym ostrożnie usunąć je z rany

Przeciwwskazania SutriSept, płyn na rany, 500 ml

Produkt nie jest odpowiedni do stosowania w przypadku operacji chrząstek hialinowych i aseptycznych operacji stawów, w uchu
środkowym i wewnętrznym, nie można go również aplikować do oczu. W przypadku kontaktu płynu z aseptyczną chiząstką należy rt
natychmiast przemyć roztworem Ringera lub fizjologicznym roztworem soli.

Nie stosować jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.

Nie stosować w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.

Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejkami, enzymami itp. Substancje te
należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem produktu.

Nie stosować do płukania i przemywania otrzewnej.

Informacje dodatkowe SutriSept, płyn na rany, 500 ml

Okres ważności produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej poniżej 25°C
wynosi 3 lata.

Po otwarciu należy zużyć produkt w ciągu 8 tygodni - zawiera substancje konserwujące.

Chronić przed słońcem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma dowodów na działanie mutagenne lub działanie toksyczne na zarodek związane ze składnikami tego produktu. Ponieważ poliheksanid nie wchłania się do krążenia ogólnoustrojowego, prawdopodobieństwo jego wydzielania do mleka matki karmiącej jest niemal zerowe.

Ze względu na brak badań klinicznych i doświadczenia w stosowaniu produktu u kobiet w ciąży i karmiących piersią, produkt należy w takich przypadkach stosować z zachowaniem ostrożności, po przeprowadzeniu oceny medycznej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Noworodki i niemowlęta: ze względu na niewystarczające dane kliniczne nie zaleca się stosowania u noworodków i niemowląt.