

Termofor gumowy Sanity 2 litry, 1 szt.



Cena: 22,79 zł

Opis słownikowy

Postać	termofor
Producent	Albert-Polska
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Termofor gumowy Sanity 2 litry, 1 szt.

Gumowy termofor 2l - ciepłe okłady przynoszą ulgę w wielu dolegliwościach, dlatego sprawdzi się w celach leczniczych i profilaktycznych. Sprawdzi się podczas zbijania gorączki, relaksacji napiętych mięśni lub stanach bólowych różnego typu np. przy bólu brzucha.

Skład Termofor gumowy Sanity 2 litry, 1 szt.

Termofor wykonany z wysokiej jakości, naturalnej gumy z ryflowanymi ściankami.

Wskazania Termofor gumowy Sanity 2 litry, 1 szt.

Termofor stosowany jest w celach profilaktyczno - leczniczych do miejscowego wygrzewania ciała.

Dawkowanie Termofor gumowy Sanity 2 litry, 1 szt.

Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50° (nie wrzątek, aby uniknąć oparzenia). Odkręć zakrętkę i powoli napełnij termofor wodą do $\frac{3}{4}$ jego objętości. Napełniając ostrożnie trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.

Aby pozbyć się nadmiaru powietrza, ostrożnie przechyl termofor, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.

Dokładnie zakręć i sprawdź szczelność kurka uważnie odwracając termofor wylotem do dołu. Jeśli jest szczelny załóż pokrowiec.

Po użyciu wylej wodę i powieś termofor wlewem do dołu, tak aby mógł wyschnąć. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu.

Zastosowanie gorącej wody o temperaturze powyżej 70°C skraca żywotność termoforu oraz może spowodować jego uszkodzenie i doprowadzić do oparzenia. Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej. Zachowaj instrukcję użytkowania.

Informacje dodatkowe Termofor gumowy Sanity 2 litry, 1 szt.

Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie dopuszczaj do kontaktu z urządzeniami grzewczymi i nie przechowuj w wysokiej temperaturze ani na słońcu. Termofor gumowy przemywaj wodą z mydłem, nie używając środków dezynfekujących. Unikaj długotrwałego, bezpośredniego kontaktu termofora bez pokrowca ze skórą. Nie obciążaj i nie przyciskaj termoforu gdy jest on napełniony wodą, nie siadaj na nim, ani nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoforze ani na nim. Zawsze przed użyciem sprawdź czy termofor nie jest uszkodzony. W razie zniszczenia jednej z części, należy wyrzucić cały wyrób. Zutylicuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.