

## Termofor Sanity EKO w pokrowcu 2 litry, 1 szt.



Cena: 19,19 zł

### Opis słownikowy

Postać	termofor
Producent	Albert-Polska
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Termofor Sanity EKO w pokrowcu 2 litry, 1 szt.

Stosowany w celach profilaktyczno-leczniczych do miejscowego ogrzewania ciała pacjenta.

#### Skład Termofor Sanity EKO w pokrowcu 2 litry, 1 szt.

Termofor wykonany jest z gumy naturalnej. Nie powinien być używany przez osoby z alergią na gumę/lateks/kauczuk.

#### Dawkowanie Termofor Sanity EKO w pokrowcu 2 litry, 1 szt.

Przed użyciem Termoforu Eko należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania.

Napełnić powoli ciepłą wodą o temperaturze ok. 50oC do 3/4 objętości termoforu.

Podczas napełniania termofor trzymać za szyjkę w pozycji pionowej.

Wypuścić nadmiar powietrza, pochylając termofor powoli nad płaską powierzchnią do momentu, aż w wylocie pojawi się woda.

Zakręcić korek i sprawdzić szczelność.

Dokręcenie korka siłą dłoni powinno być wystarczające.

Po użyciu wylać wodę i powiesić wlewnem w dół do całkowitego wysuszenia.

#### Informacje dodatkowe Termofor Sanity EKO w pokrowcu 2 litry, 1 szt.

UWAGA: Nie stosować w kuchence mikrofalowej!

Termofor wykonany jest z gumy naturalnej. Nie powinien być używany przez osoby z alergią na gumę/lateks/kauczuk.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy zaprzestać używania wyrobu i zgłosić się do lekarza.

Zastosowanie wody o temperaturze powyżej 70oC skraca żywotność termoforu. Może powodować jego uszkodzenie i w konsekwencji doprowadzić do powstania oparzeń.

Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Unikać długiego oraz bezpośredniego kontaktu wyrobu bez pokrowca z ciałem.

Stosowanie termoforu u dzieci należy zawsze przeprowadzać pod nadzorem osoby dorosłej.

Przechowywać otwarty, w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.

Myć jedynie wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekcyjnych.

W razie ewentualnego uszkodzenia jednej z części należy wyrzucić cały wyrób.