

# Test na infekcje dróg moczowych, domowy test paskowy, 1 szt. Home Check



Cena: 13,44 zł

## Opis słownikowy

Postać	test
Producent	Milapharm
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Test na infekcje dróg moczowych, domowy test paskowy, 1 szt. Home Check

Home Check Test Na infekcje dróg moczowych to wyrób medyczny w postaci domowego testu do wykrywania w moczu leukocytów, krwi, azotanów oraz białka. Jego użycie umożliwia diagnostykę infekcji dróg moczowych. Test jest prosty w obsłudze i szybki. Jego wynik jest możliwy do odczytania już w przeciągu 2 minut.

### Skład Test na infekcje dróg moczowych, domowy test paskowy, 1 szt. Home Check

#### Zawartość opakowania

Plastikowy kubek, pasek testowy, wzorzec barw, instrukcja obsługi.

### Działanie Test na infekcje dróg moczowych, domowy test paskowy, 1 szt. Home Check

Wyrób medyczny, Home Check Test Na infekcje intymne pozwala wykryć 4 parametry w próbce moczu: leukocyty, krew, azotyny i białko.

## Wskazania Test na infekcje dróg moczowych, domowy test paskowy, 1 szt. Home Check

Zaleca się wykonanie badania jeśli u pacjenta występują: ból podbrzusza, częstomocz, pieczenie, a także mętny wygląd moczu lub jego silny zapach.

## Dawkowanie Test na infekcje dróg moczowych, domowy test paskowy, 1 szt. Home Check

Zebrać mocz do plastikowego pojemnika.

Otworzyć saszetkę i wyjąć z niej pasek testowy.

Zanurzyć pasek na 1-2 sekundy w moczu. Należy przy tym uważać, by wszystkie obszary testowe zostały zanurzone.

Wyjąć pasek i wytrzeć nadmiar moczu o krawędź pojemnika lub chłonny materiał.

Odczekać 2 minuty a następnie odczytać wynik, oddzielnie dla każdego parametru porównując go z dostarczonym wzorcem.

## Przeciwwskazania Test na infekcje dróg moczowych, domowy test paskowy, 1 szt. Home Check

Nie odczytywać wyniku po upływie 3 minut.