


THC Test, domowy test do wykrywania marihuany, 1 szt. Home Check

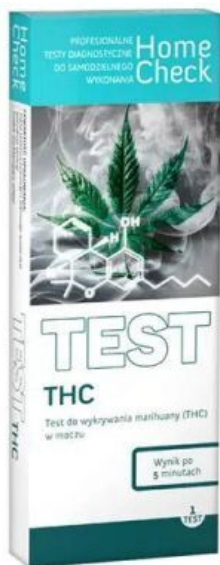

Cena: 7,59 zł

Opis słownikowy

Postać	test
Producent	Milapharm
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe THC Test, domowy test do wykrywania marihuany, 1 szt. Home Check

Wyrób medyczny w postaci szybkiego testu paskowego jednorazowego użytku do wykrywania marihuany/THC w ludzkim moczu. Test nadaje się do samodzielnego wykonania w warunkach domowych. Wynik testu jest możliwy do odczytu już w 5 minut po jego wykonaniu.

Skład THC Test, domowy test do wykrywania marihuany, 1 szt. Home Check

Zawartość opakowania

Instrukcja obsługi, karta testowa (wewnątrz foliowego woreczka), środki pochłaniające wilgoć.

Działanie THC Test, domowy test do wykrywania marihuany, 1 szt. Home Check

Home Check THC pozwala wykryć obecność jednego z najpopularniejszych narkotyków – marihuany/THC w próbce moczu. Opakowanie zawiera jednorazowy zestaw do diagnostyki in vitro w warunkach domowych.

Wskazania THC Test, domowy test do wykrywania marihuany, 1 szt. Home Check

Wyrób medyczny przeznaczony do jakościowego wykrywania obecności THC/marihuany w moczu człowieka.

Dawkowanie THC Test, domowy test do wykrywania marihuany, 1 szt. Home Check

Zdjąć zatyczkę z karty testowej.

Włożyć paski testowe do próbki moczu na 10 do 15 sekund. Uważać by mocz nie miał styczności z plastikowym urządzeniem! Może to powodować nieprawidłowe wyniki.

Włożyć nasadkę na kartę testową i umieścić ją na płaskiej powierzchni.

Odczekać 5 minut (czas powinien być obliczany od momentu wyciągnięcia karty testowej z próbki).

Odczytać wynik. UWAGA! Nie należy odczytywać wyników po upływie 5 minut!

Przeciwwskazania THC Test, domowy test do wykrywania marihuany, 1 szt. Home Check

Nie używać ponownie.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Informacje dodatkowe THC Test, domowy test do wykrywania marihuany, 1 szt. Home Check

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Jak w przypadku każdego domowego testu, wynik należy potwierdzić wykonując powtórne badanie w specjalizującej się do tego poradni, szpitalu lub innym miejscu do tego upoważnionym. Użytkownik domowego testu nie może podejmować decyzji medycznych bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem, bez względu na to czy wynik jest pozytywny czy negatywny.

Dodatni wynik testu nie oznacza, że dana osoba brała nielegalne substancje. Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na dodatni wynik testu (np. niektóre środki medyczne przyjmowane przez osobę badaną, zabrudzenie próbki moczu takimi substancjami jak wybielacz czy ałun).

Uwagi i środki ostrożności

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

W opakowaniu nie zawarte zostały: pojemnik na mocz i timer/stoper/zegarek, które są niezbędnymi elementami do wykonania testu.