

ThermaCare, kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona i nadgarstki, 2 szt.



Cena: 18,86 zł

Opis słownikowy

Marka	ThermaCare
Postać	kompres
Producent	Angelini
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Węgiel, Żelazo

Opis produktu

Informacje podstawowe ThermaCare, kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona i nadgarstki, 2 szt.

Kompresy rozgrzewające ThermaCare łagodzą ból szyi, ramion i nadgarstków. Terapeutyczne ciepło daje ulgę w bólu do 16 godzin*.

Nie zawierają substancji leczniczych.

ThermaCare to kompresy samorozgrzewające przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni i (lub) stawów związanych z:

- napięciem mięśni
- nadmiernym wysiłkiem
- przeciążeniami
- nieprawidłową postawą
- zapaleniem stawów.

Kompresy są wygodne w użyciu, specjalnie zaprojektowany kształt sprawia, że idealnie przylegają do skóry.

Skład ThermaCare, kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona i nadgarstki, 2 szt.

Kompres o długości 29 cm (powierzchnia ogrzewania 20 cm x 6,5 cm) z 2 obszarami przyklepnymi, elastycznie dopasowującymi się do ruchów.

Działanie ThermaCare, kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona i nadgarstki, 2 szt.

Opatentowana technologia komórek cieplnych powoduje głębokie wnikanie ciepła. Komórki cieplne osiągają temperaturę ok. 40°C w ciągu 30 minut utrzymując stałą temperaturę przez okres do 8 godzin.

Kompresy wytwarzają kojące, terapeutyczne ciepło, rozluźniając w ten sposób mięśnie i łagodząc ból. Pomagają poprawić ruchomość.

Dawkowanie ThermaCare, kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona i nadgarstki, 2 szt.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

1. Rozerwij saszetkę z kompresem bezpośrednio przed użyciem. Czas jaki kompres ThermaCare potrzebuje, aby osiągnąć temperaturę terapeutyczną może wynosić do 30 minut.
2. Oderwij papier, aby odstąpić stronę klejącą.
3. Zachowaj ostrożność podczas nakładania na nadgarstek – należy uważać, aby komórki cieplne nie nachodziły na siebie.
4. Kompresu nie należy używać dłużej niż przez 8 godzin w okresie 24 godzin.
5. Nie używać ponownie.

Przeciwwskazania ThermaCare, kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona i nadgarstki, 2 szt.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Osoby w wieku 55 lat i starsze: Ryzyko poparzeń skóry rośnie wraz z wiekiem. Osoby w wieku 55 lat lub starsze nie powinny stosować kompresu ThermaCare podczas snu.

Ten produkt może powodować oparzenia i (lub) pęcherze skórne. Podczas jego stosowania należy często kontrolować stan skóry. W przypadku stwierdzenia podrażnienia lub oparzenia, należy natychmiast usunąć kompres.

Osoby z cukrzycą, problemami z krążeniem, chorobą serca, reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem kompresu. Nie należy używać kompresu:

- w przypadku stwierdzenia wycieku zawartości komórek cieplnych lub jeśli kompres jest uszkodzony lub rozdarty
- jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo (na skórę)
- na zmienioną chorobowo, podrażnioną lub uszkodzoną skórę
- w miejscu siniaków lub obrzęków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin
- u osób, które nie są w stanie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania kompresu
- na obszary ciała z zaburzonym czuciem temperatury
- z innymi produktami emitującymi ciepło (np. poduszkami grzewczymi, plastrami rozgrzewającymi itp.)
- u osób które nie są w stanie samodzielnie usunąć kompresu, w tym u dzieci, niemowląt i niektórych osób w podeszłym wieku.

Należy przestać stosować kompres i skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- wystąpienia uczucia dyskomfortu, pieczenia lub pojawienia się obrzęku, wysypki lub innych zmian na skórze, które utrzymują się podczas stosowania kompresu
- nasilenia dolegliwości bólowych lub utrzymywania się bólu po 7 dniach stosowania kompresu.

Każda komórka cieplna zawiera żelazo (ok. 2 gramów). W przypadku połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeśli dojdzie do kontaktu zawartości komórki cieplnej ze skórą lub oczami, należy usunąć kompres, przemyć dotknięty obszar wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Nigdy nie należy podgrzewać kompresu w kuchenke mikrofalowej ani próbować go podgrzać powtórnie, ponieważ może się zapalić.

Informacje dodatkowe ThermaCare, kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona i nadgarstki, 2 szt.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Nie należy wywierać dodatkowego nacisku na produkt.

Jeśli kompres wydaje się zbyt gorący, należy przestać go używać lub założyć na warstwę ubrania, tak aby nie przylegał bezpośrednio do skóry.

Przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym (MRI) należy usunąć kompres, aby uniknąć zwiększonego ryzyka poparzeń.

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

producent: Angelini Pharma Inc., 1231 Wyandotte Dr., Albany, Georgia, 31705, USA

dystrybutor: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

*Łagodzenie bólu nadgarstka w czasie do 16 godzin nie było przedmiotem oceny.

Galeria



ThermaCare
 Kompresy rozgrzewające

EKSPERT W TERAPII CIEPŁEM

- 16 godzin ulgi w bólu!
- 8 godzin łagodzenia bólu podczas noszenia kompresu i do 8 godzin ulgi po jego zdjęciu
- opatentowana technologia komórek ciepłych dla głęboko przenikającego ciepła
- nie zawiera substancji leczniczych

THCRecom/09/22



ThermaCare
 Kompresy rozgrzewające

wytwarza kojące, terapeutyczne ciepło, rozluźniając w ten sposób mięśnie i skutecznie łagodząc ból

Komórki ciepłe osiągają temperaturę 40°C w ciągu 30 min utrzymując stałą temperaturę przez okres do 8 godzin.

THCRecom/09/22



ThermaCare
 Kompresy rozgrzewające

przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni i (lub) stawów związanych z:

- napięciem mięśni
- nadmiernym wysiłkiem
- przeciążeniami
- nieprawidłową postawą
- zapaleniem stawów

THCRecom/09/22



ThermaCare
 Kompresy rozgrzewające

są szczególnie przydatne w leczeniu bólu mięśniowego w okolicy szyi, barków i ramion

- anatomiczny kształt
- 2 obszary przylepne

Specjalnie ukształtowany, duża powierzchnia ogrzewania, równomiernie rozłożone ciepło dzięki opatentowanej technologii komórek ciepłych.

THCRecom/09/22



Udowodniona skuteczność na bóle mięśni i stawów

Dolna część pleców i biodra Szyja i ramiona

Wyrob medyczny THCRecom/09/22