

Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA Żel Do Usuwania Kurzajek I Brodawek W Aplikatorze 1 szt



Cena: 72,09 zł

Opis słownikowy

Marka	Undofen
Postać	żel
Producent	Omega Pharma
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA Żel Do Usuwania Kurzajek I Brodawek W Aplikatorze 1 szt

Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA kurzajki i brodawki, żel, 1 aplikator

Wyrób medyczny.

- Dla dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia.
- Produkt łatwy i szybki w aplikacji, dzięki zastosowaniu innowacyjnej formy aplikatora.
- Usuwa kurzajki oraz brodawki skutecznie i bezboleśnie.

Skład Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA Żel Do Usuwania Kurzajek I Brodawek W Aplikatorze 1 szt

Kwas trójchlorooctowy (TCA), woda.

Wskazania Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA Żel Do Usuwania Kurzajek I Brodawek W Aplikatorze 1 szt

Wyrób medyczny Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA przeznaczony jest do samodzielnego usuwania brodawek i kurzajek przy pomocy silnie stężonego żelu.

Sposób użycia wyrobu medycznego

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję użytkowania wyrobu medycznego.
- Aby zapobiec podrażnieniom i przebarwieniom, leczoną skórę należy chronić przed słońcem przez 30 dni po zabiegu.
- Przed pierwszym użyciem i zdjęciem nakrętki należy wykonać kilka pełnych obrotów, aby żel przedostał się do końcówki aplikatora.
- Stuknij aplikatorem 3 razy w twardą powierzchnię, aby żel spłynął do końcówki aplikatora.
- Zrównaj niebieskie zgrubienie (na nakrętce) i białe (na aplikatorze), a następnie zdejmij nakrętkę.
- Połóż końcówkę aplikatora na brodawkę/kurzajkę, naciśnij niebieski przycisk i trzymaj przez 10 sekund.
- Po aplikacji, nałóż nakrętkę i przekręć tak, żeby niebieski i biały punkt nie były na tej samej wysokości.
- Aplikację należy powtarzać raz w tygodniu, przez maksymalnie 6 tygodni.

Przeciwwskazania Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA Żel Do Usuwania Kurzajek I Brodawek W Aplikatorze 1 szt

Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Kwas trójchlorooctowy (TCA) ma silne działanie żrące. Należy zachować szczególną ostrożność podczas aplikacji.
- Nie polecane dla osób chorych na cukrzycę i z problemami krążenia.
- Stosować tylko do usuwania brodawek/kurzajek. Nie używać w razie wątpliwości czy jest to brodawka/kurzajka.
- Używać produkt tylko przez jedną osobę.
- Nie stosować na obszary skóry inne niż ręce i stopy.
- Nie stosować na rany i podrażnioną skórę.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Zużyć w ciągu 6 tygodni od pierwszego otwarcia opakowania.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

- Po kilku dniach leczenia powierzchnia brodawki może stać się ciemna. Jest to normalne zjawisko podczas procesu gojenia.
- Może być odczuwalne lekkie uczucie mrowienia. Jest to zjawisko normalne i przemijające.
- Jeśli dyskomfort utrzymuje się w kolejnych dniach, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA Żel Do Usuwania Kurzajek I Brodawek W Aplikatorze 1 szt

Uwagi

Nie stosować produktu w przypadkach, gdy: opakowanie lub produkt jest uszkodzony, końcówka urządzenia nie pęka podczas przekręcania nakrętki po pierwszym użyciu lub nie słychać dźwięku po kliknięciu niebieskiego przycisku.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 4. roku życia.

Producent
OMEGA PHARMA
Drażni 253/7
Brno, Czechy