

Urgo, żel na afty i drobne rany w jamie ustnej, 6 ml



Cena: 73,09 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------|
| Marka | Urgo |
| Postać | żel |
| Producent | URGO |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |
| Substancja czynna | Kwas karboksylowy |

Opis produktu

Informacje podstawowe Urgo, żel na afty i drobne rany w jamie ustnej, 6 ml

Urgo Filmogel® Afty i drobne rany w jamie ustnej to innowacyjny opatrunek w płynie, który ułatwia i przyspiesza gojenie ran. Może być stosowany od 18 roku życia.

Skład Urgo, żel na afty i drobne rany w jamie ustnej, 6 ml

Pochodna celulozy, kwas nieorganiczny, kwas karboksylowy, alkohol, woda, aromat, sukraloza.

Działanie Urgo, żel na afty i drobne rany w jamie ustnej, 6 ml

Wodoodporny płyn Urgo izoluje afty i ranę chroniąc je od pokarmu i drobnoustrojów aż do 4 godzin i działa skutecznie, nawet w trakcie posiłku. Przynosi natychmiastową ulgę w bólu – jego działanie odczuwa się już po 10 sekundach od użycia. Po 3 dniach likwiduje stan zapalny. Jest dobrze tolerowany przy długotrwałym stosowaniu, np. przy urazach spowodowanych aparatami ortodontycznymi.

Wskazania Urgo, żel na afty i drobne rany w jamie ustnej, 6 ml

Urgo na Afty jest przeznaczony do leczenia aft i drobnych ran w jamie ustnej.

Dawkowanie Urgo, żel na afty i drobne rany w jamie ustnej, 6 ml

Wyjmując szpatułkę z flakonu, wytrzeć jedną stroną o brzeg. Drugą stroną szpatułki nanieść żel na ranę, tak aby pokryć całkowicie zmienione miejsce.

Pozwolić by warstwa wyschła przez około 10 sekund i wytworzył się ochronny film. Jeśli film nie pokrywa całej powierzchni rany powtórzyć aplikację.

Nakładać tak często jak to konieczne, najlepiej przed posiłkami, ale nie częściej niż 4 razy na dobę, do całkowitego wygojenia (około 3 do 5 dni).

Skład produktu zapewnia jego higienę, dzięki temu nie jest konieczne czyszczenie szpatułki po użyciu.

Przeciwwskazania Urgo, żel na afty i drobne rany w jamie ustnej, 6 ml

Nie stosować w przypadku owrzodzenia jamy ustnej o średnicy większej niż 1 cm lub opryszczkowe owrzodzenie jamy ustnej (duża liczba małych owrzodzeń), które wymagają konsultacji lekarskiej.

Nie stosować na zainfekowane rany, oparzenia i głębokie (krwawiące) rany.

Nie stosować w przypadku alergii na pochodne kwasu salicylowego.

Palenie tytoniu w trakcie aplikacji, w czasie schnięcia preparatu lub w pobliżu otwartej butelki jest zabronione.

Informacje dodatkowe Urgo, żel na afty i drobne rany w jamie ustnej, 6 ml

W trakcie aplikacji może pojawić się uczucie pieczenia.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Przechowywać z dala od ognia i isker, w temperaturze poniżej 30oC.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży oraz karmiących z uwagi na brak dostatecznych badań.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.