


UrgoTul Ag/Silver, opatrunek ze srebrem 15 cm x 20 cm, 1 szt.

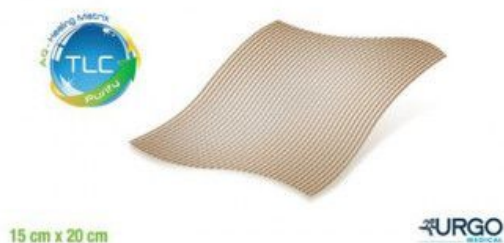

Cena: 61,29 zł

Opis słownikowy

Marka	UrgoTul
Postać	opatrunek
Producent	Polfa Łódź
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe UrgoTul Ag/Silver, opatrunek ze srebrem 15 cm x 20 cm, 1 szt.

UrgoTul Ag/Silver to opatrunek impregnowany solami srebra, otrzymany z użyciem technologii lipidowo-kołoidowej (TLC) innowacji opracowanej przez Laboratoires URGO. Opatrunek zawiera matrycę gojącą ze srebrem, wykonaną z siateczki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami hydrokoloidu (karboksymetylocelulozy), wazeliny, polimerów kohezyjnych i soli srebra.

Opatrunek UrgoTul Ag/Silver:

usuwa w ciągu 1 dnia 99,9% bakterii (*Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*),
może być stosowany w ranach głębokich, szczelinowych,
może być stosowany w terapii podciśnieniowej (NPWT) jako warstwa kontaktowa, przeciwbakteryjna, zapobiegająca wrastaniu gąbki w tkanki,
jest łatwy w aplikacji (pozostaje na miejscu po nałożeniu), nie przywiera do rany (nie niszczy nowo powstałej tkanki),
pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku, dzięki żelującej matrycy TLC, utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko,
jest przebadany klinicznie.

Działanie UrgoTul Ag/Silver, opatrunek ze srebrem 15 cm x 20 cm, 1 szt.

Po zetknięciu się z wysiękiem z rany, cząstki hydrokoloidu (CMC) tworzą żel i łączą się z matrycą, tworząc ciekłą warstwę lipidowo-kołoidową. Dzięki temu opatrunek ma szczególne właściwości: utrzymuje wilgotne środowisko, sprzyjające gojeniu rany, ulega

zżelowaniu po zetknięciu się z raną, zdjęcie opatrunku nie prowadzi do uszkodzenia nowopowstałej tkanki, bezbolesna zmiana opatrunku, ochrona otaczającej skóry.

Dodatkowo jony Ag+ matrycy gojącej ze srebrem (TLC-Ag) nadają opatrunkowi UrgoTul Ag/Silver działanie przeciwbakteryjne, które może zmniejszać miejscową ilość bakterii.

Srebro ma działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum, obejmujące bakterie Gram ujemne i Gram dodatnie oraz niektóre pleśnie i drożdże. Jest szczególnie skuteczne wobec *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Streptococcus pyogenes* i *Pseudomonas aeruginosa* (pałeczka ropy błękitnej), które są najczęściej odpowiedzialne za zakażenia ran. In vitro opatrupek wykazuje działanie przeciwbakteryjne przez okres do 7 dni.

Działanie przeciwbakteryjne opatrunku przyczynia się także do zmniejszenia nieprzyjemnego zapachu.

Wskazania UrgoTul Ag/Silver, opatrupek ze srebrem 15 cm x 20 cm, 1 szt.

UrgoTul Ag/Silver jest wskazany do leczenia ran z ryzykiem lub objawami miejscowego zakażenia bakteryjnego, z niewielką ilością wysięku, w tym w:

ranach ostrych: oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe, rany chirurgiczne,
ranach przewlekłych: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych.

Dawkowanie UrgoTul Ag/Silver, opatrupek ze srebrem 15 cm x 20 cm, 1 szt.

Oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej.

Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, dokładnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Ag/Silver.

W razie potrzeby opatrupek UrgoTul Ag/Silver można przyciąć jałowymi nożyczkami, dostosowując wielkość opatrunku do wielkości rany.

Zdjąć z opatrunku ochronne skrzydełka.

Nałożyć opatrupek UrgoTul Ag/Silver bezpośrednio na ranę.

Przykryć opatrupek UrgoTul Ag/Silver drugim opatrunkiem (sterylną wkładką odpowiednią do pochłaniania wysięku, zabezpieczoną bandażem).

W razie potrzeby założyć bandaż uciskowy.

Opatrupek UrgoTul Ag/Silver można zmieniać co 1 do 3 dni w zależności od leczonej rany i przebiegu gojenia.

Czas trwania leczenia UrgoTul Ag/Silver nie powinien przekroczyć jednego miesiąca.

Przeciwwskazania UrgoTul Ag/Silver, opatrupek ze srebrem 15 cm x 20 cm, 1 szt.

Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.

Nie sterylizować повторно opatrunku.

Nie zaleca się równoczesnego stosowania z innymi miejscowymi terapiami.

Nie stosować u kobiet ciężarnych ani karmiących piersią, noworodków i wcześniaków ze względu na brak danych w tych grupach pacjentów.

Informacje dodatkowe UrgoTul Ag/Silver, opatrupek ze srebrem 15 cm x 20 cm, 1 szt.

Leczenie opatrunkiem UrgoTul Ag/Silver należy prowadzić pod kontrolą lekarską.

Zastosowanie opatrunku nie wyklucza potrzeby odpowiedniego, ogólnoustrojowego leczenia przeciwbakteryjnego zainfekowanej rany zgodnie z lokalnie przyjętymi standardami.

Opatrupek UrgoTul Ag/Silver może przywierać do rękawic chirurgicznych (lateksowych). Z tego powodu zaleca się zwilżenie rękawic roztworem soli fizjologicznej, aby ułatwić trzymanie opatrunku.

Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia powinni wiedzieć, że istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące długotrwałego i wielokrotnego stosowania opatrunków zawierających srebro, w szczególności u dzieci i noworodków. Unikać kontaktu z elektrodami i żelami

przewodzącymi w trakcie pomiarów elektronicznych, np. EEG i EKG. Nie stosować w komorze hiperbarycznej.
Opatrunek jednorazowy, dla jednego pacjenta, sterylny: powtórne użycie może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona.
Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Producent

URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove