

## Varolast Plus, opaska z pastą cynkową 10 cm x 10 m, 1 szt.



Cena: 77,19 zł

### Opis słownikowy

Postać	opaska
Producent	Hartmann
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Tlenek cynku

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Varolast Plus, opaska z pastą cynkową 10 cm x 10 m, 1 szt.

Varolast Plus Opaska z pastą cynkową, elastyczną w kierunku wzdłużnym.

Po nałożeniu Varolast plus tworzy nieruchomy, półsztywny, trwały opatrunek zapewniający warunki dla skutecznej terapii uciskowej. W równym stopniu nadaje się do zaopatrzenia złamań i odciążenia aparatu więzadłowego.

## Skład Varolast Plus, opaska z pastą cynkową 10 cm x 10 m, 1 szt.

Materiał nośny: 69% wiskoza, 31% poliamid

Pasta: tlenek cynkowy, gliceryna

## Wskazania Varolast Plus, opaska z pastą cynkową 10 cm x 10 m, 1 szt.

Opaska Varolast Plus może być stosowana:

W ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej jako opatrunek odciążający przy uszkodzeniach aparatu więzadłowego.  
Jako wtórne unieruchomienie złamań i zwichnięć.  
Jako kontynuacja leczenia po zdjęciu opatrunku gipsowego.

W podostrej i przewlekłej zakrzepicy.  
W zapaleniach żył głębokich i powierzchownych.  
W owrzodzeniach łydki i dermatozach zastoinowych w stadium niesączącym.

## Dawkowanie Varolast Plus, opaska z pastą cynkową 10 cm x 10 m, 1 szt.

Wskazówki dotyczące techniki zakładania

Nerw piszczelowy osłonić przed uciskiem opatrunku przy pomocy wyściółki.  
Przednią część stopy ustawić pod kątem prostym do łydki w położeniu nieznacznie odwiedzonej na zewnątrz.  
Wymodelować dokładnie opaskę na łydce z przyłożeniem równomiernego nacisku przy nakładaniu opaski.  
Gotowy opatrunek przykryć warstwą osłaniającą rękawa opatrunkowego Stülpa.  
Zadbać, aby pacjent natychmiast zaczął chodzić, aby zapewnić współdziałanie opatrunku i pracy mięśni z pożytkiem dla skuteczności terapii.  
Opatrunek Varolast plus należy zmienić, gdy na skutek ustępowania zastoin opatrunek uległ poluzowaniu.

## Przeciwwskazania Varolast Plus, opaska z pastą cynkową 10 cm x 10 m, 1 szt.

Varolast plus nie należy stosować przy następujących schorzeniach:

zaawansowana choroba zarostowa tętnic obwodowych;  
zastoinowa niewydolność serca;  
ABPI (ankle-brachial pressure index - wskaźnik kostka-ramię) > 1,3;  
owrzodzenia pochodzenia tętniczego;  
nietolerancja na użyte materiały;  
wyraźne zaburzenia czucia w kończynach dolnych.

## Informacje dodatkowe Varolast Plus, opaska z pastą cynkową 10 cm x 10 m, 1 szt.

Szczególna ostrożność musi zostać zachowana w przypadku pacjentów z:

schorzeniami skóry  
diabetes mellitus (cukrzyca)  
owrzodzeniami mieszanymi (żylnymi – tętniczymi)  
ABPI (ankle-brachial pressure index - wskaźnik kostka-ramię) ≤ 0,.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.