

Velox Wipes, chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, 100 szt.

Cena: 6,49 zł



Opis słownikowy

Postać	chusteczki
Producent	Medisept
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Skład Velox Wipes, chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, 100 szt.

100 g roztworu zawiera:

40 g propan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g etanol, 0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-produkty reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy

Opakowanie:

puszka 100 szt., wkład 100 szt.

Działanie Velox Wipes, chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, 100 szt.

Działają już od 30 sek. na wirusy otoczkowe, Adeno, Rota, bakterie, grzyby, prątki gruźlicy

Zalecane do unitów, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów

Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością

Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe – opinia Fame

Chusteczki włókninowe 13×20 cm, 23 g/m²

Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa stosowania

Wysoka redukcja ryzyka zakażenia
Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni
Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
Dają efekt odświeżenia
Ekonomiczne w użyciu

Wskazania Velox Wipes, chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, 100 szt.

Velox® Wipes zalecane są specjalnie do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej. Polecane jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Dawkowanie Velox Wipes, chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, 100 szt.

Wkład umieścić w puszcze. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszek. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

Informacje dodatkowe Velox Wipes, chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, 100 szt.