

Viscoplast Optiplast, plastry okulistyczne, 82 x 57 mm, 10 szt



Cena: 22,49 pln

Opis słownikowy

Marka	VISCOPLAST
Postać	plastry
Producent	3M POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Informacje podstawowe Viscoplast Optiplast, plastry okulistyczne, 82 x 57 mm, 10 szt

Viscoplast Opti-Plast

- wyrób medyczny
- Plastry okulistyczne są bardzo delikatne i komfortowe w użyciu. Silikonowa, przyjazna skórze dziecka formuła kleju zmniejsza ryzyko podrażnień w porównaniu z tradycyjnym klejem akrylowym.
- Plastry okulistyczne o wymiarach 82 mm x 57 mm mają starannie opracowany kształt, który zapewnia lepsze dopasowanie.
- Plastry okulistyczne dla dzieci są komfortowe i bezbolesne w odklejaniu dzięki silikonowej formule kleju.
- Plastry na oko są bezpieczne dla delikatnej i wrażliwej skóry.
- Są hipoalergiczne.
- Pozwalają skórze oddychać.

Wskazania Viscoplast Optiplast, plastry okulistyczne, 82 x 57 mm, 10 szt

Viscoplast Opti-Plast przeznaczone są do stosowania w terapii okluzyjnej oczu, np. w leczeniu zez.

Dawkowanie Viscoplast Optiplast, plastry okulistyczne, 82 x 57 mm, 10 szt

1. Skórę wokół oka umyć i osuszyć.
2. Usunąć papier zabezpieczający plaster.

3. Lekko przymknąć oczy uważając, aby nie napinać mięśni. Nie zaciskać oczu.
4. Przyłożyć opatrunek centralnie na oko, węższą stroną do nosa, i rozpocząć przylepianie od strony nosa w kierunku brwi. Nie naciągać plastra ani skóry wokół oka.
5. Po umiejscowieniu plastra lekko docisnąć palcem część przylepną wokół oka.

W przypadku skóry suchej posmarować okolicę oka kremem nawilżającym, szybko wchłaniającym się i dopiero po 30-0 minutach zastosować plaster.

Przeciwwskazania Viscoplast Optiplast, plastry okulistyczne, 82 x 57 mm, 10 szt

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać ponownie.