

## Viscoplast plastry na odciski z kwasem salicylowym, 6 szt.



Cena: 25,29 zł

### Opis słownikowy

Marka	Viscoplast
Postać	plastry
Producent	3M
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Viscoplast plastry na odciski z kwasem salicylowym, 6 szt.

Plastry Viscoplast z kwasem salicylowym to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania na odciski na stopach. Plaster jest łatwy w użyciu, wodoodporny i niewidoczny na skórze.

## Skład Viscoplast plastry na odciski z kwasem salicylowym, 6 szt.

Masa zawiera 40% kwasu salicylowego.

## Działanie Viscoplast plastry na odciski z kwasem salicylowym, 6 szt.

Kwas salicylowy zawarty w opatrunku utrzymuje odpowiednie pH i wilgotność raby, dzięki czemu zmiękcza zrogowaciałą skórę i ułatwia jej usuwanie (co za tym idzie ułatwia usuwanie odcisków i nagniotków). Jednocześnie plaster chroni przed uciskiem i powstawaniem nowych otarć.

## Wskazania Viscoplast plastry na odciski z kwasem salicylowym, 6 szt.

Wyrób medyczny do stosowania na odciski palców stóp.

## Dawkowanie Viscoplast plastry na odciski z kwasem salicylowym, 6 szt.

1. Dokładnie umyj i osusz stopę.
2. Oderwij folię ochronną.
3. Starannie przyklej plaster na stopę, tak aby pierścień ochronny otaczał odcisk.

Stosować aż do momentu usunięcia odcisku, jednak nie dłużej niż 10 - 14 dni. Plastry należy zmieniać co około 24 godziny.

## Przeciwwskazania Viscoplast plastry na odciski z kwasem salicylowym, 6 szt.

Jeśli w trakcie zabiegów skóra stanie się wrażliwa i zaczerwieniona należy poczekać z nałożeniem kolejnego plastra.

## Informacje dodatkowe Viscoplast plastry na odciski z kwasem salicylowym, 6 szt.

- W opakowaniu znajduje się 6 plastrów o wymiarach 70 x 12,5 mm.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.