

Viscoplast Tegaderm+Pad, opatrunek warstwowy, chłonny, wodoodporny, 6 x 10 cm, 3 szt.



Cena: 17,09 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Marka | Viscoplast |
| Postać | opatrunek |
| Producent | 3M |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Informacje podstawowe Viscoplast Tegaderm+Pad, opatrunek warstwowy, chłonny, wodoodporny, 6 x 10 cm, 3 szt.

Viscoplast Tegaderm+Pad, wodoodporny opatrunek z warstwą chłonną, 3szt.

- wyrób medyczny
- sterylny
- rozmiar 6 x 10 cm (rozmiar warstwy chłonnej 2,5 x 6 cm)

Działanie Viscoplast Tegaderm+Pad, opatrunek warstwowy, chłonny, wodoodporny, 6 x 10 cm, 3 szt.

Viscoplast Tegaderm+Pad, wodoodporny opatrunek z warstwą chłonną:

- Wodoodporny opatrunek chroni przed dostępem wody, zanieczyszczeniem i bakteriami pomagając zapobiegać infekcji.
- Umożliwia utrzymanie codziennej higieny ciała.
- Może pozostać na skórze do 4 dni.
- Dopasowuje się do kształtów ciała.
- Nieprzywierająca do rany warstwa chłonna.

- Hipoalergiczny klej jest delikatny i przyjazny dla skóry.

Wskazania Viscoplast Tegaderm+Pad, opatrunek warstwowy, chłonny, wodoodporny, 6 x 10 cm, 3 szt.

Przeznaczony jest do opatrywania ran ostrych i przewlekłych, cięć pooperacyjnych, zranień, skaleczeń, oparzeń, otarć.

Dawkowanie Viscoplast Tegaderm+Pad, opatrunek warstwowy, chłonny, wodoodporny, 6 x 10 cm, 3 szt.

- Zatamaj krwawienie przed aplikacją opatrunku.
- Nie naciągaj opatrunku podczas aplikacji ponieważ może to doprowadzić do urazu skóry.
- Upewnij się, że skóra jest sucha i czysta w celu uniknięcia jej podrażnienia oraz zapewnienia dobrego przylegania.
- Wodoodporny opatrunek może być stosowany na zainfekowane miejsca wyłącznie przez personel medyczny.

Aplikacja:

1. Otwórz kopertę i wyjmij sterylny opatrunek.
2. Usuń papier zabezpieczający z opatrunku, w celu odsłonięcia warstwy przylepnej.
3. Opatrunek należy umieścić ponad raną lub miejscem wklucia i nakleić.
4. Dokładnie dociśnij brzegi opatrunku.
5. Usuń papierową ramkę z opatrunku. Wygładź brzegi i upewnij się, że przylega dobrze do cewnika lub okolicy przyrannej.

Usunięcie opatrunku:

W celu usunięcia opatrunku, delikatnie uchwycić brzegi i powoli usunąć opatrunek zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Aby uniknąć uszkodzenia skóry, zdejmuj opatrunek odklejając go wzdłuż skóry a nie pociągając w górę.

Przeciwwskazania Viscoplast Tegaderm+Pad, opatrunek warstwowy, chłonny, wodoodporny, 6 x 10 cm, 3 szt.

Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

Informacje dodatkowe Viscoplast Tegaderm+Pad, opatrunek warstwowy, chłonny, wodoodporny, 6 x 10 cm, 3 szt.

- Wodoodporny opatrunek nie może być stosowany zamiast szwów chirurgicznych oraz w celu pierwotnego zamknięcia rany.
- Nie jest wykonany z naturalnego lateksu.