

Viscoplast Tegaderm + Pad, opatrunek z warstwą chłonną, wodoodporny, 9 x 15 cm, 3 szt.



Cena: 24,49 zł

Opis słownikowy

Marka	Viscoplast
Postać	opatrunek
Producent	3M
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Viscoplast Tegaderm + Pad, opatrunek z warstwą chłonną, wodoodporny, 9 x 15 cm, 3 szt.

Opatrunek wodoodporny Viscoplast Tegaderm + Pad wykonany przezroczystej folii poliuretanowej z warstwą chłonną stanowi skuteczną i długotrwałą ochronę rany przed bakteriami i brudem.

Opatrunek złożony jest z nieprzywierającej do rany warstwy chłonnej umieszczonej na cienkiej, przezroczystej poliuretanowej folii z hipoalergicznym klejem bez lateksu. Warstwa chłonna nie przywiera do rany i zatrzymuje wilgoć z dala od niej. Hipoalergiczny.

Skład Viscoplast Tegaderm + Pad, opatrunek z warstwą chłonną, wodoodporny, 9 x 15 cm, 3 szt.

3 opatrunki 9 cm x 15 cm

Działanie Viscoplast Tegaderm + Pad, opatrunek z warstwą chłonną, wodoodporny, 9 x 15 cm, 3 szt.

- ochrona przed wodą, brudem i bakteriami
- oddychający

- warstwa chłonna nie przywiera do rany
- może pozostać na skórze do 4 dni
- można używać podczas kąpieli

Wskazania Viscoplast Tegaderm + Pad, opatrunek z warstwą chłonną, wodoodporny, 9 x 15 cm, 3 szt.

Wodoodporny opatrunek Viscoplast Tegaderm + Pad przeznaczony do opatrywania ran ostrych takich jak skaleczenia, drobne i powierzchowne oparzenia, otarcia oraz nacięcia chirurgiczne.

Dawkowanie Viscoplast Tegaderm + Pad, opatrunek z warstwą chłonną, wodoodporny, 9 x 15 cm, 3 szt.

Umyj i osusz dokładnie ranę oraz skórę wokół niej

- Usuń papier zabezpieczający z opatrunku, w celu odsłonięcia warstwy przylepnej.
- Opatrunek umieść nad raną i dociśnij brzegi opatrunku. Nie naciągaj opatrunku podczas aplikacji.
- Usuń papierową ramkę z opatrunku wygładzając jego krawędzie.

W celu usunięcia opatrunku, delikatnie uchwycić brzegi i powoli usunąć opatrunek zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Zmień opatrunek w przypadku gdy zacznie przeciekać, nie trzyma się skóry lub jest uszkodzony.

Przeciwwskazania Viscoplast Tegaderm + Pad, opatrunek z warstwą chłonną, wodoodporny, 9 x 15 cm, 3 szt.

Wodoodporny opatrunek Viscoplast TegadermTM + Pad nie jest przeznaczony do stosowania na rany zainfekowane i głębokie oparzenia. Jeżeli istnieją objawy zakażenia takie jak gorączka, ból, zaczerwienienie, obrzęk, wysypka lub pieczenie należy skontaktować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe Viscoplast Tegaderm + Pad, opatrunek z warstwą chłonną, wodoodporny, 9 x 15 cm, 3 szt.

Ostrzeżenia

- Zatrzymaj krwawienie przed aplikacją opatrunku.
- Upewnij się, że skóra jest sucha i czysta w celu uniknięcia jej podrażnienia oraz zapewnienia dobrego przylegania opatrunku.
- Opatrunek nie może być stosowany zamiast szwów chirurgicznych oraz w celu pierwotnego zamknięcia rany.