

Wartix, środek do usuwania kurzajek, 38 ml



Cena: 26,87 zł

Opis słownikowy

Producent	Genexo
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Dimetyloeter

Opis produktu

Informacje podstawowe Wartix, środek do usuwania kurzajek, 38 ml

Dla dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia. Pozwala na szybkie i skuteczne usunięcie kurzajek z dłoni i stóp w warunkach domowych. Oparty jest na metodzie szybkiego wymrażania. Innowacyjny i łatwy w użyciu aplikator. Posiada mechanizm samoczynnego odmierzania dawki.

Skład Wartix, środek do usuwania kurzajek, 38 ml

Zawartość opakowania

Dozownik z aplikatorem zawierający dimetyloeter (DME).
Plastry ochronne.
Gaziki czyszczące.
Ulotka informacyjna.

Działanie Wartix, środek do usuwania kurzajek, 38 ml

Wartix oparty jest na metodzie szybkiego wymrażania. Jest to metoda skuteczna i bezpieczna. Płyn zamrażający aplikowany jest bezpośrednio na kurzajkę, która ulega wymrożeniu aż po rdzeń. Proces wymrażania może spowodować zaczerwienienie lub pojawienie się pęcherzyków na skórze, co jest zupełnie normalnym zjawiskiem. Zazwyczaj jednokrotna aplikacja jest wystarczająca. Po 10-14 dniach od wymrożenia kurzajka odpada, pozostawiając zdrowy, zregenerowany naskórek.

Wskazania Wartix, środek do usuwania kurzajek, 38 ml

Wyrób przeznaczony jest do usuwania kurzajek na dłoniach i stopach, w warunkach domowych.

Dawkowanie Wartix, środek do usuwania kurzajek, 38 ml

Przed użyciem należy zapoznać się z załączoną ulotką informacyjną.

Nie należy zdejmować plastikowego aplikatora z dozownika.

Zwróć kurzajkę ku górze tak, aby zmieściła się w komorze aplikatora. Następnie przyłóż aplikator, tak by krawędzie komory szczelnie przylegały do skóry wokół kurzajki.

Trzykrotnie przyciśnij dozownik kciukiem, aby uwolnić płyn zamrażający. Przytrzymaj aplikator na kurzajce przez co najmniej 10 sekund.

Zdejmij aplikator z kurzajki. W tym momencie może wystąpić uczucie mrowienia lub lekkiego bólu.

Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator gazikiem czyszczącym znajdującym się w zestawie.

Kurzajkę można zakleić plasterem ochronnym znajdującym się w zestawie.

Po zabiegu może powstać pęcherzyk, ale nie należy go przekłuwać. Pęcherzyk jest zazwyczaj oznaką skutecznego leczenia.

Po zabiegu należy unikać zainfekowania kurzajki.

Przeciwwskazania Wartix, środek do usuwania kurzajek, 38 ml

Nie stosować u chorych na cukrzycę, z zaburzeniami krążenia lub uczulonych na zimno.

Nie stosować w przypadku podrażnienia lub zapalenia skóry, w miejscach, w których występuje delikatna skóra (twarz, szyja, pachy, biust i pośladki).

Nie stosować w leczeniu brodawek na narządach płciowych, znamion, (owłosionych) pieprzyków i wszelkich innych zmian skórnych mających dziwny wygląd.

Nie stosować w połączeniu z inną metodą leczenia kurzajek.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać z dala od źródeł zapłonu.

Nie wdychać rozpylanej cieczy.

Informacje dodatkowe Wartix, środek do usuwania kurzajek, 38 ml

Jeżeli kurzajka nie odpadnie w ciągu dwóch tygodni od wymrażania, zabieg można powtórzyć.

Jedną kurzajkę można wymrażać maksymalnie cztery razy (przy czym należy zachować dwutygodniowy odstęp między kolejnymi zabiegami).

Jeżeli po czterech próbach kurzajka nie odpadnie, najlepiej zgłosić się do lekarza.