


Zatoxin Rinse zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

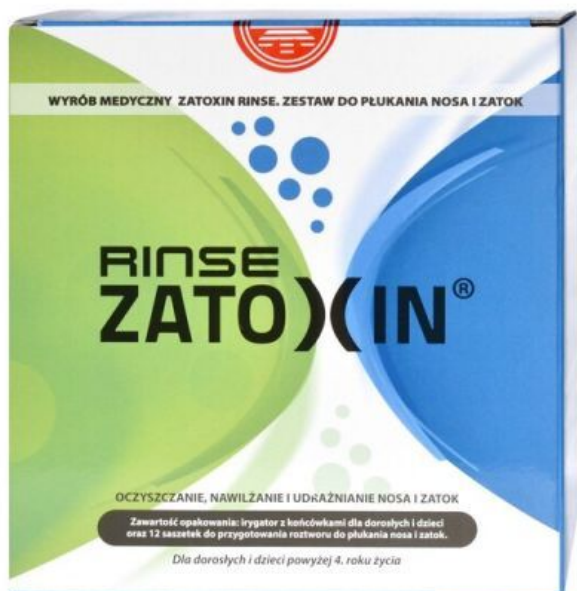

Cena: 16,76 zł

Opis słownikowy

Marka	Zatoxin
Postać	proszek
Producent	Tactica Pharmaceuticals
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Chlorek sodu

Opis produktu

Skład Zatoxin Rinse zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

Skład saszetki: chlorek sodu, dwuwęglan sodu.

Zawartość opakowania

Butelka do irygacji (max pojemność 300 ml) - 1 szt.

Saszetki w kartoniku z proszkiem do przygotowania roztworu - 12 szt.

Końcówki do irygacji klasycznej i łagodnej - 2 szt.

Instrukcja używania - 1 szt.

Działanie Zatoxin Rinse zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

Zatoxin Rinse pozwala na dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym ograniczając gromadzenie się czynników, które mogą powodować infekcję. Dodatkowo wyrób nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową nosa i zatok. Unikalna konstrukcja irygatora umożliwia płukanie nosa i zatok w łatwy i kontrolowany sposób – bez użycia dodatkowej siły i bez konieczności ściskania butelki.

Wskazania Zatoxin Rinse zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

Wyrób medyczny stosuje się:

w zapaleniu zatok przynosowych,
w nieżycie nosa różnego pochodzenia,
przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
profilaktycznie, w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Dawkowanie Zatoxin Rinse zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w nieżycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok oraz profilaktycznie, w celu zachowania higieny nosa i zatok: rozpuścić 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować izotoniczny roztwór do irygacji.

W przypadku silnych objawów takich jak np. uciążliwe uczucie zatkanego nosa: rozpuścić 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji.

Płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

Informacje dodatkowe Zatoxin Rinse zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją użycia, która zawiera istotne informacje dotyczące sposobu i warunków jego stosowania.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Całkowita blokada nosa uniemożliwiająca wydostanie się roztworu.

Nie stosować u osób, u których występuje poważne krwawienie z nosa.

Nie należy stosować wyrobu w przypadku otwartych ran w obrębie nosa, zwłaszcza nie zagojonych ran po zabiegach chirurgicznych.

Nie stosować u osób z zaburzeniami równowagi.