

Zestaw Promocyjny Chicco Naturalfeeling, laktator manualny, 1 szt. + Wkładki laktacyjne, 60 szt GRATIS

Cena: 208,29 zł



Opis słownikowy

Marka	Chicco
Postać	zestaw
Producent	Artsana
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Informacje podstawowe Zestaw Promocyjny Chicco Naturalfeeling, laktator manualny, 1 szt. + Wkładki laktacyjne, 60 szt GRATIS

Zestaw zawiera Laktator manualny Naturalfeeling Chicco oraz wkładki laktacyjne Chicco 60 szt. Laktator ręczny Chicco jest pomocny w wspieraniu karmienia piersią kiedy występuje nadmiar mleka lub kiedy karmienie piersią nie jest możliwe. W tych przypadkach można odciągać pokarm, przechować i podać je dziecku kiedy wystąpi taka potrzeba.

Skład Zestaw Promocyjny Chicco Naturalfeeling, laktator manualny, 1 szt. + Wkładki laktacyjne, 60 szt GRATIS

Zestaw zawiera:

- 1 butelka NaturalFeeling 0m + 150 ml
- 1 hermetyczna nakrętka
- 1 smoczek Natural Feeling na butelkę 0m + 150 ml
- 1 podstawka do laktatora
- próbki wkładek laktacyjnych 60 sztuk

Wskazania Zestaw Promocyjny Chicco Naturalfeeling, laktator manualny, 1 szt. + Wkładki laktacyjne, 60 szt GRATIS

Laktator manualny do odciągania pokarmu kobiecego.

Dawkowanie Zestaw Promocyjny Chicco Naturalfeeling, laktator manualny, 1 szt. + Wkładki laktacyjne, 60 szt GRATIS

Umyć ręce i opłukać piersi wodą lub przetrzeć praktycznymi chusteczkami Chicco do pielęgnacji piersi.

Aby ułatwić przepływ mleka, można wziąć gorący prysznic lub przyłożyć ciepły ręcznik do piersi tuż przed odciąganiem mleka lub przed karmieniem piersią.

Usiąść w wygodnej pozycji.

Dobrze przypasować lejek do piersi upewniając się, że brodawka znajduje się na samym jego środku. Używanie laktatora jest możliwe zarówno z użyciem miękkiej silikonowej nakładki, jak i bez niej. Zaleca się wypróbować obie konfiguracje i wybrać tę najbardziej odpowiednią i wygodną.

Delikatnie nacisnąć na uchwyt, aż na piersi poczucie się odsysanie, a następnie zwolnić go. Można regulować nacisk na uchwyt w zależności od siły ciągu wywieranej na pierś lub w zależności od wypływającego mleka: może okazać się niepotrzebne naciskanie uchwytu do końca.

Rozpocząć szybkim ruchem, energicznie naciskając i zwalniając uchwyt, aby stymulować odciąganie mleka. Kiedy mleko zacznie spływać, naciskać na uchwyt w wolniejszym rytmie, przytrzymując go na 1-2 sekundy, a następnie zwalniać.

Mleko można odciągać na przemian z obu piersi.

Aby podać dziecku mleko zaraz po jego odciągnięciu, należy założyć na butelkę nakrętkę ze smoczkiem. W ten sposób uzyska się wygodną butelkę (Wellbeing lub Naturalfeeling), gotową do użycia.

Zamykając butelkę praktyczną, hermetyczną zakrętką (w zestawie), odciągnięte mleko można przechowywać w lodówce przez maksymalnie 48 godzin i przez 3 miesiące w zamrażalniku.

Przeciwwskazania Zestaw Promocyjny Chicco Naturalfeeling, laktator manualny, 1 szt. + Wkładki laktacyjne, 60 szt GRATIS

Wszystkie części dokładnie wymyć wodą z płynem do mycia naczyń, obficie wypłukać, a następnie dokładnie osuszyć miękką i czystą szmatką lub pozostawić do wyschnięcia w czystym i dobrze wentylowanym miejscu.

Nie używać materiałów ściernych do czyszczenia laktatora.

Wszystkie elementy, za wyjątkiem zaworu i uchwytu, mogą być myte w zmywarce, stosując cykl delikatny. Ten rodzaj czyszczenia, bardziej agresywny, może spowodować odbarwienie lub z czasem zmatowienie materiału.

Informacje dodatkowe Zestaw Promocyjny Chicco Naturalfeeling, laktator manualny, 1 szt. + Wkładki laktacyjne, 60 szt GRATIS

Urządzenie i jego akcesoria przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Elementów opakowania (plastikowych worków, pudełek, itp.) nie wolno zostawiać w zasięgu dzieci, gdyż są one potencjalnym źródłem

zagrożeń.

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że urządzenie i jego elementy są w nienaruszonym stanie i bez widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się do wykwalifikowanego personelu.

Urządzenie może być wykorzystywane tylko do celów, do których zostało zaprojektowane. Każde inne użycie uważane jest za niewłaściwe.

Produkt ten powinien być używany wyłącznie z butelką linii Wellbeing i NaturalFeeling Chicco, nie używać butelek innego rodzaju. Więcej informacji na temat czyszczenia butelek i jej akcesoriów znajduje się w instrukcji dołączonej do laktatora.