

Zestaw Promocyjny Diagnosis, ciśnieniomierz UA 611 + Witamina C Forte, 20 tab. mus. + Magnez Skurcz, 20 tab. mus.



Cena: 129,39 zł

Opis słownikowy

Marka	AND A&D Medical
Postać	zestaw
Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Magnez, Potas, Witamina B6, Witamina C

Opis produktu

Skład Zestaw Promocyjny Diagnosis, ciśnieniomierz UA 611 + Witamina C Forte, 20 tab. mus. + Magnez Skurcz, 20 tab. mus.

AND UA-611, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt Diagnosis
Zestaw zawiera:

ciśnieniomierz AND UA-611
mankiet SlimFit (22-32 cm)
cztery baterie AA
instrukcja.

Witamina C FORTE, 1000 mg tabletki musujące, 20 szt. VITTER BLUE

regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja wzmacniająca: kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja słodząca: sorbitol; regulator kwasowości: węglany sodu; aromat; nośnik substancji słodzących: glikol polietylenowy; substancje słodzące: aspartan, sacharyny; barwnik: ryboflawiny. Witamina C FORTE 1000 mg suplement diety zawiera substancje słodzące. Zawiera źródło fenyloalaniny. Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

Magnez Skurcz, tabletki musujące, 20 szt.

regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan potasu; węglan magnezu; regulator kwasowości: wodorowęglan sodu; substancja wiążąca: sorbitol; aromat grejpfrutowy; stabilizator: glikol polietylenowy; substancje słodzące: cyklaminian sodu, acesulfam K; koncentrat buraka czerwonego; barwnik: ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwnik: beta-karoten. Magnez Skurcz suplement diety zawiera substancje słodzące.

Działanie Zestaw Promocyjny Diagnosis, ciśnieniomierz UA 611 + Witamina C Forte, 20 tab. mus. + Magnez Skurcz, 20 tab. mus.

AND UA-611, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt Diagnosis

Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i precyzyjny pomiar, dzięki czemu codzienne pomiary ciśnienia krwi stały się prostsze.

klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowy
czytelny, 3-liniowy wyświetlacz
pomiar dokonywany jednym przyciskiem
wskaźnik nieregularnego pulsu IHB
wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia* (WHO - World Health Organization)
pamięć 30 ostatnich pomiarów, wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów
komfortowy mankiet SlimFit M (22-32 cm), opcjonalnie L (31-45 cm)
5 lat gwarancji door to door na ciśnieniomierz
2 lata gwarancji na mankiet.

Witamina C FORTE, 1000 mg tabletki musujące, 20 szt. VITTER BLUE

Witamina C 1000 mg Forte wspiera układ odpornościowy oraz bierze udział w produkcji kolagenu, wspomagając prawidłowe funkcjonowanie chrząstki, skóry, naczyń krwionośnych, kości i zębów. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Zwiększa przyswajanie żelaza. Zawarta w suplementie diety witamina C wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego. Witamina C sprzyja prawidłowej produkcji kolagenu. oraz prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, dziąseł i skóry.

Magnez Skurcz, tabletki musujące, 20 szt.

Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w magnez i potas oraz witaminę B6. Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, dodatkowo wraz z witaminą B6 wspomagają prace układu nerwowego. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Dawkowanie Zestaw Promocyjny Diagnosis, ciśnieniomierz UA 611 + Witamina C Forte, 20 tab. mus. + Magnez Skurcz, 20 tab. mus.

AND UA-611, ciśnieniomierz automatyczny naramienny, 1 szt Diagnosis

Założyć mankiet na ramieniu (najlepiej na lewym, na poziomie serca). Podczas pomiaru należy siedzieć spokojnie. Wcisnąć przycisk START. Zostaną wyświetlone wszystkie elementy wyświetlacza. Przez krótki moment będzie migać symbol „0”. Następnie dane na wyświetlaczu zmienią się i rozpoczyna się pomiar. Mankiet zacznie się napełniać. Uczucie uciskania jest normalne. Podczas napełniania zostanie wyświetlony pasek wskazujący ciśnienie. UWAGA: W celu zakończenia pompowania w dowolnym momencie należy ponownie wcisnąć przycisk START. Po zakończeniu pompowania rozpocznie się automatyczny spust powietrza, a znak zacznie migać, wskazując, że pomiar jest w toku. Po wykryciu tętna, znak będzie migać z każdym uderzeniem serca. Uwaga: Jeżeli nie zostanie osiągnięte prawidłowe ciśnienie, urządzenie automatycznie rozpocznie ponowne pompowanie. Po zakończeniu pomiaru, wyświetlone zostaną wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz wartość tętna. Mankiet wypompowuje pozostałe powietrze do całkowitego opróżnienia. Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie wcisnąć przycisk START.

Witamina C FORTE, 1000 mg tabletki musujące, 20 szt. VITTER BLUE

Sposób użycia Vitter Blue Witamina C Forte 1000 mg: rozpuścić tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody. Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletkę dziennie. Produkt do spożycia bezpośrednio po przyrządzeniu. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Magnez Skurcz, tabletki musujące, 20 szt.

Dorośli: 1 tabletkę dziennie. Rozpuścić w szklance zimnej wody.

Galeria

