


Zuma świetlik Pure, krople do oczu bez konserwantów, 10 ml DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

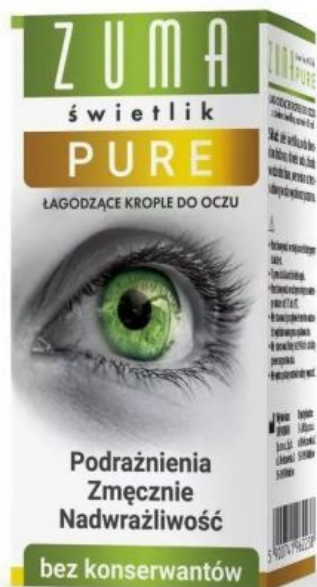

Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

Marka	Zuma
Postać	krople
Producent	S-Lab
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Świetlik

Opis produktu

Informacje podstawowe Zuma świetlik Pure, krople do oczu bez konserwantów, 10 ml DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Wyrób medyczny Zuma Świetlik Pure to łagodzące i odświeżające krople do oczu, które zawierają ekstrakt z ziele świetlika oraz nie posiadają dodatku konserwantów.

Skład Zuma świetlik Pure, krople do oczu bez konserwantów, 10 ml DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Ziele świetlika, sodu diwodorofosforan, chlorek sodu, disodu wodorofosforan, wersenian czterosodowy, woda wysokooczyszczona.

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli.

Działanie Zuma świetlik Pure, krople do oczu bez konserwantów, 10 ml DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Krople łagodzą zaczerwienienie i podrażnienia oczu spowodowane długotrwałą pracą przed komputerem lub niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi (np. słońcem, wiatrem, suchym powietrzem, słoną wodą, dymem, kurzem, ogrzewaniem lub klimatyzacją). Przywracają one homeostazę powierzchni oczu i zmniejszają ich zmęczenie.

Wskazania Zuma światlik Pure, krople do oczu bez konserwantów, 10 ml DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Krople do użytku zewnętrznego.

Dawkowanie Zuma światlik Pure, krople do oczu bez konserwantów, 10 ml DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

1. Dokładnie umyj i osusz dłonie.
2. Zdejmij osłonkę z zakraplacza, lekko odchyl głowę do tyłu, a dolną powiekę odciągnij delikatnie do dołu.
3. Trzymając butelkę pionowo wkrop jedną kroplę do worka spojówkowego.
4. Zamknij powiekę i poruszaj gałką oczną.
5. Czynności powtórz dla drugiego oka.
6. Załóż osłonkę na zakraplacz.

Stosowanie produktu

Zaleca się stosowanie 1 kropli do każdego worka spojówkowego, 3-4 razy dziennie lub w zależności od potrzeb. Produkt można stosować z każdym rodzajem soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania Zuma światlik Pure, krople do oczu bez konserwantów, 10 ml DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych infekcji oka.
Nie należy dotykać zakraplaczem do oka ani innych powierzchni.

Informacje dodatkowe Zuma światlik Pure, krople do oczu bez konserwantów, 10 ml DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze 5-35°C.
Chronić od źródeł ciepła.
Zużyć w ciągu 90 dni od pierwszego otwarcia.
Ze względów higienicznych jedna butelka powinna być używana tylko przez jedną osobę.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

W przypadku stosowania innych leków okulistycznych należy odczekać minimum 15 minut przed podaniem kropli Zuma Światlik Pure. Produkt powinien być podawany jako ostatni.